

2025

健康機器カタログ

		
		
		 こちらから最新の健康機器カタログを ご覧いただけます。

INDEX

血圧計	P.4
体温計	P.18
ネブライザ・吸入器	P.24
体重体組成計	P.38
活動量計・歩数計	P.42
電動歯ブラシ	P.45
治療機器	P.48
マッサージ機器	P.50
補聴器	P.51
パルスオキシメータ	P.51
心電計	P.52

カタログに掲載の商品の製造販売業者はオムロンヘルスケア株式会社です。

上腕式血圧計

上腕式血圧計のおすすめ機能

● 血圧計の使い方に適した腕帯

軟性腕帯

リング付きだから、しっかり巻ける

腕の形に合わせて、すき間なくぴったりと巻くことができます。
 やわらかく、ソフトな装着感で測定することができます。

細腕用腕帯（対象腕周：17～22cm）、太腕用腕帯（対象腕周：32～42cm）も別売品としてご用意。



フィットカフ

腕にあてるだけで
自分で簡単に巻ける

上腕を360°カバーする新し空気袋を採用。

装着時、どの角度に腕帯が回転しても正確に測れます。



e-フィットカフ

簡単に巻けて締めつけ感を軽減

ぴったり腕にフィットする構造で、ずれることなく片手で簡単に、正しく巻くことが可能です。

新素材の採用で、締めつけによる痛みを軽減。

● 正しく巻けたか確認できる、
カフぴったり巻きチェック

ぴったり正しく
巻かれているときに点灯



巻き方が
ゆるいときに点灯

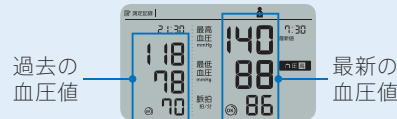
● 体動お知らせ

測定中に体が動くと「体動マーク」が表示されます。
 マーク表示時は、姿勢の固定や再測定をお勧めします。



● 比較画面

最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示。
 簡単に血圧値を比較できます。



※ 対応機種:HCR-7712T2/7612T2/7402

● 不規則脈波お知らせ

測定中に脈が適切に検出されない時に表示されます。



● 早朝高血圧確認機能

朝の週平均値が、最高血圧135mmHg以上または最低血圧85mmHg以上のとき点灯します。



● 平均値表示

直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を自動計算して表示します。



● 血圧確認機能

測定した血圧が家庭高血圧の基準値※以上の時に表示します。

血圧高

※ 家庭高血圧の基準値:最高135mmHg以上または最低85mmHg以上
 (日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2019)
 ※ 機種によって表示されるマークが異なります。

上腕式血圧計〈医家向け〉

病棟や様々な使用シーンでの使いやすさを追求した看護師さんのための血圧計

自動血圧計 HBP-1320

メーカー希望小売価格 **¥26,000**(税別)

本体質量：約520g(付属品・オプション品含まず)

外形寸法：幅123×高さ99×奥行き201mm

医療機器認証番号：303AABZX00004000

一般の名称：医用電子血圧計

管理医療機器 特定保守管理医療機器

JANコード：4975479418723

対象腕周
22～32cm

※ 別売カフの使用で12～50cmまで対応可能

頑丈ボディ

聴診モード搭載

アルコール消毒可能

防滴構造

医家向け専用扇型腕帯

不規則脈波お知らせ

バックライト

ACアダプタ(付属)

バッテリー(付属)搭載可能※1

※1 満充電で約300回使用可能

2年保証付



持ちやすい取っ手



特長1

落下などからの保守設計



本体の外周を覆う衝撃吸収バンパー

特長2

本体・カフをアルコールで拭き取り可能



特長3

聴診モードマニュアルを搭載



豊富なカフサイズ

巻きやすい医家向け専用の扇形カフを5種類のサイズバリエーションで
ご用意。本体にはMサイズ(チューブ長:1m)が標準で付属。



◀HBP-1320 消耗品



サイズ / 対応腕周	GSカフ2 (チューブ長:1m)	GSカフ2 (チューブ長:4.5m)
SSサイズ / 12～18cm	¥6,000 JANコード:4975479418778 型番:HXA-GCFSS-PBJ	9,600 JANコード:4975479418822 型番:HXA-GCFSS-PCJ
Sサイズ / 17～22cm	¥6,000 JANコード:4975479418761 型番:HXA-GCFS-PBJ	¥9,600 JANコード:4975479418815 型番:HXA-GCFS-PCJ
Mサイズ / 22～32cm	¥7,200 JANコード:4975479418754 型番:HXA-GCFM-PBJ	¥10,800 JANコード:4975479418808 型番:HXA-GCFM-PCJ
Lサイズ / 32～42cm	¥12,000 JANコード:4975479418747 型番:HXA-GCFL-PBJ	¥15,600 JANコード:4975479418792 型番:HXA-GCFL-PCJ
XLサイズ / 42～50cm	¥12,000 JANコード:4975479418730 型番:HXA-GCFL-PBJ	¥15,600 JANコード:4975479418785 型番:HXA-GCFL-PCJ

上腕式血圧計〈医家向け〉

自動測定と聴診法の2方式に対応

オムロン デジタル自動血圧計 HEM-907
メーカー希望小売価格 **¥45,600**(税別)

本体質量：約910g
外形寸法：幅139×高さ203×奥行き131mm
医療機器認証番号：21200BZZ00144000
一般の名称：医用電子血圧計
管理医療機器 特定保守管理医療機器
JANコード：4975479415609

対象腕周
22～32cm

※ 別売カフの使用で17～42cmまで対応可能

聴診モード搭載

平均モード搭載

脈波レベル表示

不規則脈波回数表示

加圧設定機能

手動減圧コントロール機能

非表示機能

ACアダプタ(付属)

バッテリー(別売)搭載可能※1

※1 満充電で約300回使用可能

おすすめ品

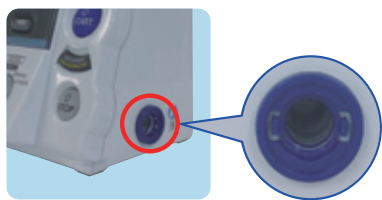


豊富な設置バリエーション




◀HEM-907 消耗品

新タイプコネクタ部



旧タイプコネクタ部

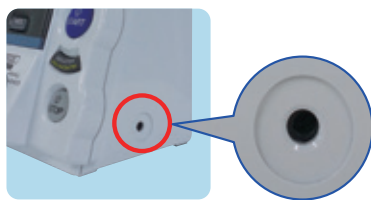

注) 本体とカフを接続するコネクタ部の形状は新・旧タイプの2種類あり本機をご購入いただいた時期により異なります。適応カフが新・旧で異なりますので、ご注文の際は間違いのないようご注意ください。

新タイプコネクタ対応

サイズ / 適応腕周	HEM-907カフ/ブラダーセット	サイズ	HEM-907ブラダー
Sサイズ / 17～22cm	¥6,000 JANコード:4975479418631 型番:HXA-907S-PD チューブ長:1.5m、エアプラグ付き	S	¥1,900 JANコード:4975479418662 型番:HXA-907BLS-PD チューブ長:1.5m、エアプラグ付き
Mサイズ / 22～32cm	¥7,200 JANコード:4975479418648 型番:HXA-907M-PD チューブ長:1.5m、エアプラグ付き	M	¥2,000 JANコード:4975479418679 型番:HXA-907BLM-PD チューブ長:1.5m、エアプラグ付き
Lサイズ / 32～42cm	¥8,400 JANコード:4975479418655 型番:HXA-907L-PD チューブ長:1.5m、エアプラグ付き	L	¥2,000 JANコード:4975479418686 型番:HXA-907BLL-PD チューブ長:1.5m、エアプラグ付き

新・旧タイプコネクタ対応

サイズ	カフ (ブラダーなし)
S	¥4,300 JANコード:4975479177163 型番:HEM-907-CUFFS
M	¥5,000 JANコード:4975479177125 型番:HEM-907-CUFFM
L	¥6,500 JANコード:4975479177118 型番:HEM-907-CUFFL

上腕式血圧計

スイッチひとつで簡単操作、しっかりとカフが巻けるベーシックモデル

オムロン 上腕式血圧計 HCR-7107

オープン価格

質量：本体(カフを除く)約310g(電池含まず)、カフ 約130g
寸法：本体(カフを除く)約幅105×高さ87×奥行き153mm
カフ約幅145×長さ466mm、チューブ長さ610mm
電源：ACアダプタ/AC100V(別売) 単3形アルカリ乾電池×4(約300回※1)
医療機器認証番号：301AABZX00022000
一般的名称：自動電子血圧計
管理医療機器

1分



特長がよくわかる！
製品紹介動画

おすすめ品



対象腕周
22～32cm

軟性腕帯

メモリ機能
1人×
90回

※ 別売カフの使用で17～42cmまで対応可能

細腕・太腕用腕帯対応(別売)

カフぴったり巻きチェック

血圧確認機能※2

体動お知らせ

不規則脈波お知らせ

ACアダプタ(別売)

※1 単3形アルカリ乾電池使用時、オムロンヘルスケア社試験条件による。

※2 血圧値が家庭血圧の基準値:135/85mmHg以上の場合表示。(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2019)

かんたんを追求したシンプルモデル

オムロン 上腕式血圧計 HEM-8712

オープン価格

本体質量：約250g(電池含まず)
外形寸法：幅103×高さ80×奥行き129mm
電源：ACアダプタ/AC100V(別売)
単3形アルカリ乾電池×4(約300回)
医療機器認証番号：225AABZX00102000
一般的名称：自動電子血圧計
管理医療機器
日本製



対象腕周
22～32cm

軟性腕帯

メモリ機能
前回値
メモリ

※ 別売カフの使用で17～42cmまで対応可能

細腕・太腕用腕帯対応(別売)

前回値メモリ

体動お知らせ

不規則脈波お知らせ

ACアダプタ(別売)

上腕式血圧計

自分で簡単に巻けるフィットカフを採用

オムロン 上腕式血圧計 HCR-7106 オープン価格

本体質量：約310g(電池含まず)
外形寸法：幅105×高さ87×奥行き153mm
電源：ACアダプタ／AC100V(別売)
単3形アルカリ乾電池×4(約300回※1)
医療機器認証番号：301AABZX00022000
一般的名称：自動電子血圧計
管理医療機器



対象腕周 17～36cm	フィットカフ	メモリ機能 1人× 60回
-----------------	--------	---------------------

- カフぴったり巻きチェック
- 血圧確認機能※2
- 体動お知らせ
- 不規則脈波お知らせ
- 平均値表示※3
- ACアダプタ(別売)

※1 単3形アルカリ乾電池使用時、オムロンヘルスケア社試験条件による。
※2 血圧値が家庭血圧の基準値:135/85mmHg以上の場合表示。
(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2019)
※3 直近の測定から10分以内に測った測定記録(最大3回)の平均値を表示。



血圧の変化を簡単に確認

オムロン 上腕式血圧計 HCR-7402 オープン価格

本体質量：約460g(電池含まず)
外形寸法：幅191×高さ85×奥行き120mm
電源：ACアダプタ／AC100V(付属)
単3形アルカリ乾電池×4(約300回※1)
医療機器認証番号：301AABZX00021000
一般的名称：自動電子血圧計
管理医療機器



対象腕周 17～36cm	フィットカフ	メモリ機能 2人× 100回
-----------------	--------	----------------------

- カフぴったり巻きチェック
- 血圧確認機能※2
- 体動お知らせ
- 不規則脈波お知らせ
- 平均値表示※3
- 朝週/晩週平均値表示※4
- ACアダプタ(付属)

※1 単3形アルカリ乾電池使用時、オムロンヘルスケア社試験条件による。
※2 血圧値が家庭血圧の基準値:135/85mmHg以上の場合表示。
(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2019)
※3 直近の測定から10分以内に測った測定記録(最大3回)の平均値を表示。
※4 今週と過去7週間の朝・晩それぞれの週ごとの平均を表示できます。

大きな文字で測定結果が見やすい 腕帯収納モデル

オムロン 上腕式血圧計 HEM-8731 オープン価格

本体質量：約640g(電池含まず)
外形寸法：幅183×高さ99×奥行き230mm
対象腕周：17～36cm
電源：ACアダプタ／AC100V(別売)
単3形アルカリ乾電池×4(約300回)
医療機器認証番号：225AABZX00103A01
一般的名称：自動電子血圧計
管理医療機器



腕帯をスッキリ収納

対象腕周 17～36cm	フィットカフ	メモリ機能 1人× 60回
-----------------	--------	---------------------

- カフぴったり巻きチェック
- 体動お知らせ
- 不規則脈波お知らせ
- 平均値表示
- ACアダプタ(別売)

毎日の血圧管理をスマートに実現

オムロン 上腕式血圧計 HCR-7501T オープン価格



本体質量：約340g(電池含まず)
外形寸法：幅105×高さ85×奥行き152mm
電源：ACアダプタ／AC100V(別売)
単3形アルカリ乾電池×4(約300回※1)
医療機器認証番号：301AABZX00022000
一般的名称：自動電子血圧計
管理医療機器



対象腕周 17～36cm	フィットカフ	メモリ機能 1人× 100回
-----------------	--------	----------------------

- カフぴったり巻きチェック
- 血圧確認機能※2
- 体動お知らせ
- 不規則脈波お知らせ
- 平均値表示※3
- ACアダプタ(別売)
- Bluetooth®通信対応

※1 単3形アルカリ乾電池使用時、オムロンヘルスケア社試験条件による。
※2 血圧値が家庭血圧の基準値:135/85mmHg以上の場合表示。
(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2019)
※3 直近の測定から10分以内に測った測定記録(最大3回)の平均値を表示。
◎植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

上腕式血圧計

「バックライト機能」で 暗い部屋でも結果が見やすい

オムロン 上腕式血圧計 HEM-7281T オープン価格

本体質量：約365g(電池含まず)
外形寸法：幅115×高さ86×奥行き145mm
電源：ACアダプタ/AC100V(付属)
単3形アルカリ乾電池×4(約300回)
医療機器認証番号：226AABZX00160000
一般的名称：自動電子血圧計
管理医療機器 日本製



対象腕周 17～36cm	フィットカフ	メモリ機能 1 2 2人× 100回
-----------------	--------	--------------------------

カフぴったり巻きチェック	血圧値レベル表示	体動お知らせ
不規則脈波お知らせ	平均値表示	早朝高血圧確認機能
バックライト付き	ACアダプタ(付属)	Bluetooth®通信対応

◎ 植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎ 「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

毎日の血圧管理をスマートに実現

オムロン 上腕式血圧計 HCR-7712T2 オープン価格



本体質量：約470g(電池含まず)
外形寸法：幅191×高さ85×奥行き120mm
電源：ACアダプタ/AC100V(付属)
単3形アルカリ乾電池×4(約300回※1)
医療機器認証番号：301AABZX00021000
一般的名称：自動電子血圧計
管理医療機器



対象腕周 17～36cm	e-フィットカフ	メモリ機能 1 2 2人× 100回
カフぴったり巻きチェック	血圧確認機能※2	体動お知らせ
不規則脈波お知らせ	平均値表示※3	朝週/晩週平均値表示※4
バックライト付き	ACアダプタ(付属)	Bluetooth®通信対応

※1 単3形アルカリ乾電池使用時、オムロンヘルスケア社試験条件による。
※2 血圧値が家庭血圧の基準値:135/85mmHg以上の場合表示。
(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2019)
※3 直近の測定から10分以内に測った測定記録(最大3回)の平均値を表示。
※4 今週と過去7週間の朝・晩それぞれの週ごとの平均を表示できます。
◎ 植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎ 「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

血圧の変化をより早く、気づきやすく

オムロン 上腕式血圧計 HCR-7612T2 オープン価格



本体質量：約460g(電池含まず)
外形寸法：幅191×高さ85×奥行き120mm
電源：ACアダプタ/AC100V(付属)
単3形アルカリ乾電池×4(約300回※1)
医療機器認証番号：301AABZX00021000
一般的名称：自動電子血圧計
管理医療機器



対象腕周 17～36cm	e-フィットカフ	メモリ機能 1 2 2人× 100回
-----------------	----------	--------------------------

カフぴったり巻きチェック	血圧確認機能※2	体動お知らせ
不規則脈波お知らせ	平均値表示※3	朝週/晩週平均値表示※4
ACアダプタ(付属)	Bluetooth®通信対応	

※1 単3形アルカリ乾電池使用時、オムロンヘルスケア社試験条件による。
※2 血圧値が家庭血圧の基準値:135/85mmHg以上の場合表示。
(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2019)
※3 直近の測定から10分以内に測った測定記録(最大3回)の平均値を表示。
※4 今週と過去7週間の朝・晩それぞれの週ごとの平均を表示できます。
◎ 植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎ 「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

上腕式血圧計〈全自動タイプ〉

上腕式血圧計〈全自動タイプ〉のおすすめ機能

● 正しい測定姿勢に導く機能 測定姿勢チェック表示

腕帯部が自由に動き、正しい角度になると青いマークが中央部に表示されます。正しい姿勢がとれていることを目で見て確認できます。



● 血圧確認機能

測定した血圧が家庭高血圧の基準値※以上の時に表示します。

血圧高

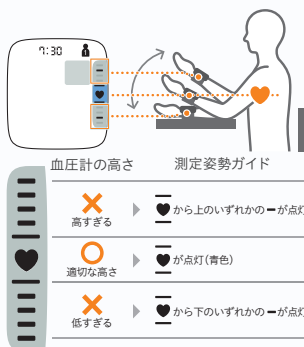
※ 家庭高血圧の基準値:最高135mmHg以上または最低85mmHg以上
(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2019)
※ 機種によって表示されるマークが異なります。

手首式血圧計

手首式血圧計のおすすめ機能

● 正しい姿勢をお知らせ 測定姿勢ガイド

手首式血圧計で血圧を正しく測るには、手首を心臓の高さに持ってくるのが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯します。



● 正しく巻けたか確認できる カフぴったり巻きチェック



ぴったり正しく
巻かれているときに点灯



巻き方が
ゆるいときに点灯

● 1.5秒クイックスタート

電源オフの状態から測定開始までの起動時間が従来の約半分となり、すぐに測定を開始するので、忙しい朝の時間帯でもすばやく測定できます。

● サイレント測定

音を大幅に抑えたことにより、オフィスや移動中など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定することができます。

● 不規則脈波お知らせ

測定中に脈が適切に検出されない時に表示されます。



● 平均値表示

直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を自動計算して表示します。



● 体動お知らせ

測定中に体が動くと「体動マーク」が表示されます。マーク表示時は、姿勢の固定や再測定をお勧めします。



● 早朝高血圧確認機能

朝の週平均値が、最高血圧135mmHg以上または最低血圧85mmHg以上のとき点灯します。



● 血圧確認機能

測定した血圧が家庭高血圧の基準値※以上の時に表示します。

血圧高

※ 家庭高血圧の基準値:最高135mmHg以上または最低85mmHg以上
(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2019)
※ 機種によって表示されるマークが異なります。

上腕式血圧計〈全自動タイプ〉

腕を入れるだけで簡単に測定できる

オムロン デジタル自動血圧計 HCR-1802

オープン価格

本体質量：約1.7kg(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法：幅179×高さ211×奥行き246mm
電源：ACアダプタ/AC100V(付属)・単2形アルカリ乾電池×4(約300回)
医療機器認証番号：305AHBZX00024000
一般の名称：自動電子血圧計
管理医療機器



対象腕周
17～32cm

メモリ機能
1 2 2人×
100回

可動式腕帯

早朝高血圧確認機能

測定ミスお知らせ(姿勢・体動)

朝週/夜週平均値表示

平均値表示

血圧確認機能

不規則脈波お知らせ

2人分の早朝高血圧が確認できる

オムロン デジタル自動血圧計 HCR-1602

オープン価格

スポットアーム

本体質量：約1.6kg(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法：幅230×高さ217×奥行き228mm
電源：ACアダプタ/AC100V(付属)・単3形アルカリ乾電池×4(約250回)
医療機器認証番号：218AGBZX00030000
一般の名称：自動電子血圧計
管理医療機器

NEW



対象腕周
17～32cm

メモリ機能
1 2 2人×
84回

可動式腕帯

早朝高血圧確認機能

測定ミスお知らせ(姿勢・体動)

朝週/夜週平均値表示

平均値表示

スマートフォンで血圧データ管理も可能 大きな画面で測定結果が見やすい

オムロン 上腕式血圧計 HCR-1902T2

オープン価格

本体質量：約1.7kg(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法：幅179×高さ211×奥行き246mm
電源：ACアダプタ/AC100V(付属)・単2形アルカリ乾電池4個(約300回)
医療機器認証番号：305AHBZX00024000
一般の名称：自動電子血圧計
管理医療機器

connect
OMRON



対象腕周
17～32cm

メモリ機能
1 2 2人×
100回

可動式腕帯

早朝高血圧確認機能

測定ミスお知らせ(姿勢・体動)

朝週/夜週平均値表示

平均値表示

血圧確認機能

不規則脈波お知らせ

Bluetooth®通信対応

腕を入れるだけで正しく測定できる

オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1000 スポットアーム

オープン価格

本体質量：約1.6kg(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法：幅230×高さ217×奥行き228mm
電源：ACアダプタ/AC100V(付属)
単3形アルカリ乾電池×4(約250回)
医療機器認証番号：218AGBZX00030A01
一般の名称：自動電子血圧計
管理医療機器



対象腕周
17～32cm

メモリ機能
1 2 2人×
90回

可動式腕帯

測定ミスお知らせ(姿勢・体動)

不規則脈波お知らせ

平均値表示

◎植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

全自動血圧計〈医家向け〉健太郎

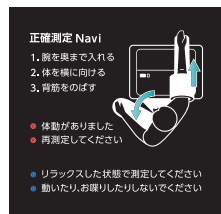
「正確測定」と「使いやすさ」を追求したスタンダードモデル

自動血圧計 HBP-9035

メーカー希望小売価格 **¥318,000** (税別)

本体質量：約5.5kg
外形寸法：幅460×高さ270×奥行き420mm ※アームレストを除く
電源：AC100V 50/60Hz
医療機器認証番号：231ABZX00007000
一般の名称：医用電子血圧計
販売名：自動血圧計 HBP-9030シリーズ
管理医療機器 特定保守管理医療機器
JANコード：4975479417238

「正確測定サポート」機能を搭載し、測定姿勢をイラストと音声ガイドでサポート



正確測定
サポート機能
搭載



対象腕周
17～42cm

1分



特長がよくわかる！
製品紹介動画

全自動

平均値測定

外部出力端子

測定結果読み上げ※1

プリンタ

※1 測定後、結果を音声でお知らせします。(音を消すことも可能です。)

「正確測定サポート」機能を搭載、液晶画面でさらに分かりやすく

自動血圧計 HBP-9036C

メーカー希望小売価格 **¥424,000** (税別)

本体質量：約5.5kg
外形寸法：幅460×高さ270×奥行き420mm
※アームレストを除く
電源：AC100V 50/60Hz
医療機器認証番号：231ABZX00007000
一般の名称：医用電子血圧計
販売名：自動血圧計 HBP-9030シリーズ
管理医療機器 特定保守管理医療機器
JANコード：4975479417245

オリジナルメッセージの表示が可能



正確測定
サポート機能
搭載



対象腕周
17～42cm

1分



特長がよくわかる！
製品紹介動画

全自動

平均値測定

オリジナルメッセージ表示※1

測定結果読み上げ※2

プリンタ

外部出力端子

※1 液晶画面で3種類まで表示可能です。

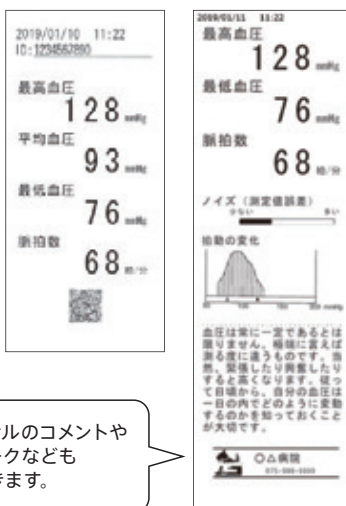
※2 測定後、結果を音声でお知らせします。(音を消すことも可能です。)

特長 (9035/9036C共通)

可動式腕帯が正しい測定姿勢をサポート



印字例 (9035/9036C共通)



オリジナルのコメントや
ロゴマークなども
印字できます。

別売品・消耗品 (9035/9036C共通)

写真	部品名	型番	価格 (税別)
		JANコード	
	架台セット	HBP-ST-903	¥38,000
		4975479198960	
	腕帯ユニット (カフカバー付)	HBP-ARU-903	¥28,000
		4975479198984	
	カフカバー (1セット)	HBP-9021-CUCO	¥3,000
		4975479188770	
	プリンタペーパー (箱/10個)	COL-RPAP-NO16	¥9,500
		4538612630521	

手首式血圧計

シンプルで使いやすい

オムロン 手首式血圧計 HEM-6183

オープン価格

本体質量：約86g(電池含まず) 外形寸法：幅93×高さ62×奥行き20mm(カフ含まず)
電源：単4形アルカリ乾電池×2(約300回)
医療機器認証番号：230AGBZX00002000 一般的名称:自動電子血圧計 管理医療機器



正確測定かんたんサポート

対象手首周
13.5～21.5cm

カフぴったり巻きチェック

体動お知らせ

血圧確認機能

不規則脈波お知らせ



シンプルに測定できる手首式のベーシックモデル

オムロン 手首式血圧計 HEM-6161

オープン価格

本体質量：約80g(電池含まず)
外形寸法：幅84×高さ62×奥行き21mm(カフ含まず)
電源：単4形アルカリ乾電池×2(約300回)
医療機器認証番号：230AGBZX00001000
一般的名称:自動電子血圧計
管理医療機器



対象手首周
13.5～21.5cm

不規則脈波お知らせ



約1.5秒で測定開始できるクイックスタート

オムロン 手首式血圧計 HEM-6230

オープン価格

本体質量：約90g(電池含まず)
外形寸法：幅91×高さ63.4×奥行き13.4mm(カフ含まず)
電源：単4形アルカリ乾電池×2(約300回)
医療機器認証番号：230AGBZX00003000
一般的名称:自動電子血圧計
管理医療機器



対象手首周
13.5～21.5cm

正確測定サポート機能

測定姿勢ガイド

カフぴったり巻きチェック

サイレント測定

血圧確認機能

体動お知らせ

不規則脈波お知らせ

平均値表示



手軽に測って、アプリで血圧管理 電源ONから約1.5秒で測定

オムロン 手首式血圧計 HEM-6231T2-JE

オープン価格

本体質量：約90g(電池含まず)
外形寸法：幅91×高さ63.4×奥行き13.4mm(カフ含まず)
電源：単4形アルカリ乾電池×2(約300回)
医療機器認証番号：230AGBZX00003000
一般的名称:自動電子血圧計
管理医療機器



対象手首周
13.5～21.5cm

正確測定サポート機能

正しく巻けたか確認できる

正しい姿勢をお知らせ

血圧確認機能

体動お知らせ

不規則脈波お知らせ

朝週平均値表示

平均値表示

Bluetooth®通信対応



基準値を超えたらお知らせ 電源ONから約1.5秒で測定

オムロン 手首式血圧計 HEM-6232T

オープン価格

本体質量：約90g(電池含まず)
外形寸法：幅91×高さ63.4×奥行き13.4mm(カフ含まず)
電源：単4形アルカリ乾電池×2(約300回)
医療機器認証番号：230AGBZX00003000
一般的名称:自動電子血圧計
管理医療機器 日本製



対象手首周
13.5～21.5cm

正確測定サポート機能

正しく巻けたか確認できる

正しい姿勢をお知らせ

血圧確認機能

体動お知らせ

不規則脈波お知らせ

朝週平均値表示

平均値表示

Bluetooth®通信対応



◎ 植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎ 「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

◎ 植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎ 「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

血圧計対応表

下表に掲載の 5 機種は、製造時期により血圧計本体のコネクタ部の形状が異なり、それぞれ対応のカフが異なります。

※2021 年 2 月以降生産分のオムロン上腕式血圧計の一部機種について、JIS 規格対応に伴いカフ(腕帯)と血圧計本体をつなぐ「エアプラグ」および「腕帯コネクタ」の形状が変更されました。

「旧タイプ」の本体コネクタ部と対応エアプラグ



血圧計本体コネクタ部



カフのエアプラグ部

「新タイプ」の本体コネクタ部と対応エアプラグ



血圧計本体コネクタ部



カフのエアプラグ部

型式が で塗られている商品は血圧計本体の販売は終了しています。

青文字は標準付属品です / ●はエアプラグ付きです / 価格は全て税別です。

商品型式名	本体コネクタ部の形状	フィットカフ (17~36cm)	標準サイズカフ (22~32cm)	細腕用カフ (17~22cm)	太腕用カフ (32~42cm)	エアプラグ	ACアダプタ
HEM-7120	旧タイプ	—	HEM-CUFF-R24GY ¥2,000 4975479408151	HEM-CUFF-S24GY ¥2,000 4975479408175	HEM-RML31● ¥2,000 4975479409721	HEM-7121-AIPR ¥200 4975479194245	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
	新タイプ	—	HEM-CR24-B● ¥2,000 4975479418600	HEM-CS24-B● ¥2,000 4975479418563	HEM-RML31-B● ¥2,000 4975479418570	—	
HEM-7122	旧タイプ	—	HEM-CUFF-R24GY ¥2,000 4975479408151	HEM-CUFF-S24GY ¥2,000 4975479408175	HEM-RML31● ¥2,000 4975479409721	HEM-7121-AIPR ¥200 4975479194245	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
	新タイプ	—	HEM-CR24-B● ¥2,000 4975479418600	HEM-CS24-B● ¥2,000 4975479418563	HEM-RML31-B● ¥2,000 4975479418570	—	
HEM-7281T	旧タイプ	HEM-FM31● ¥2,000 4975479409691	—	—	—	HEM-7320F-AIPR ¥200 4975479193514	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
	新タイプ	HEM-FM31-B● ¥2,000 4975479418587	—	—	—	—	
HEM-8712	旧タイプ	—	HEM-CUFF-R24GY ¥2,000 4975479408151	HEM-CUFF-S24GY ¥2,000 4975479408175	HEM-RML31● ¥2,000 4975479409721	HEM-7121-AIPR ¥200 4975479194245	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
	新タイプ	—	HEM-CR24-B● ¥2,000 4975479418600	HEM-CS24-B● ¥2,000 4975479418563	HEM-RML31-B● ¥2,000 4975479418570	—	
HEM-8731	旧タイプ	HEM-FM31● ¥2,000 4975479409691	—	—	—	HEM-7320F-AIPR ¥200 4975479193514	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
	新タイプ	HEM-FM31-B● ¥2,000 4975479418587	—	—	—	—	

血圧計対応表

型式が で塗られている商品は血圧計本体の販売は終了しています。

青文字は標準付属品です / ●はエアプラグ付きです / 価格は全て税別です。

商品型式名	e-フィットカフ (17~36cm)	フィットカフ (17~36cm)	フィットカフ (17~32cm)	標準サイズカフ (22~32cm)	細腕用カフ (17~22cm)	太腕用カフ (32~42cm)	エアプラグ	ACアダプタ
HCR-7106	—	HEM-FM31-B● ¥2,000 4975479418587	—	—	—	—	—	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HCR-7107	—	—	—	HEM-CR24-B● ¥2,000 4975479418600	HEM-CS24-B● ¥2,000 4975479418563	HEM-RML31-B● ¥2,000 4975479418570	—	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HCR-7402	—	HEM-FM31-B● ¥2,000 4975479418587	—	—	—	—	—	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HCR-7501T	—	HEM-FM31-B● ¥2,000 4975479418587	—	—	—	—	—	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HCR-7502T	HEM-FSM50-B● ¥3,000 4975479418594	—	—	—	—	—	—	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HCR-7612T2	HEM-FSM50-B● ¥3,000 4975479418594	—	—	—	—	—	—	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HCR-7712T2	HEM-FSM50-B● ¥3,000 4975479418594	—	—	—	—	—	—	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HCR-7800T※1	—	—	—	HEM-CR24-B● ¥2,000 4975479418600	HEM-CS24-B● ¥2,000 4975479418563	HEM-RML31-B● ¥2,000 4975479418570	—	—
HCR-1602	—	—	—	—	—	—	—	HHP-AH02 ¥2,500 4975479426209
HCR-1802	—	—	—	—	—	—	—	HHP-AH02 ¥2,500 4975479426209
HCR-1902T2	—	—	—	—	—	—	—	HHP-AH02 ¥2,500 4975479426209
HEM-1000	—	—	—	—	—	—	—	HEM-AC-N ¥2,500 4975479186004
HEM-1011 HEM-1021	—	—	—	—	—	—	—	HEM-AC-N ¥2,500 4975479186004
HEM-1040	—	—	—	—	—	—	—	HEM-AC-Q ¥2,500 4975479186639
HEM-7121	—	—	—	HEM-CUFF-R24GY ¥2,000 4975479408151	HEM-CUFF-S24GY ¥2,000 4975479408175	HEM-RML31● ¥2,000 4975479409721	HEM-7121-AIPR ¥200 4975479194245	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-7130-HP HEM-7133	—	—	—	HEM-CUFF-R24GY ¥2,000 4975479408151	HEM-CUFF-S24GY ¥2,000 4975479408175	HEM-RML31● ¥2,000 4975479409721	HEM-7121-AIPR ¥200 4975479194245	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-7134	—	HEM-FM31● ¥2,000 4975479409691	—	—	—	—	HEM-7320F-AIPR ¥200 4975479193514	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-7210	—	—	—	HEM-CUFF-R24GY ¥2,000 4975479408151	HEM-CUFF-S24GY ¥2,000 4975479408175	—	HEM-7080-AIPR ¥200 4975479695124	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-7220	—	—	—	—	—	—	HEM-AIPR-J ¥200 4975479189494	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-7250-IT HEM-7251G	—	—	—	—	—	—	HEM-AIPR-J ¥200 4975479189494	—
HEM-7252G-HP	—	—	—	HEM-CR24-L● ¥2,000 4975479409790	HEM-CS24-L● ¥2,000 4975479409776	HEM-RML31-L● ¥3,000 4975479409783	HEM-7121-AIPR ¥200 4975479194245	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-7271T	—	HEM-FM31● ¥2,000 4975479409691	—	—	—	—	HEM-7320F-AIPR ¥200 4975479193514	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-7300 HEM-7301-IT	—	—	—	—	—	—	HEM-AIPR-E ¥200 4975479580758	—
HEM-7310 HEM-7325T	—	HEM-FM31● ¥2,000 4975479409691	—	—	—	—	HEM-7320F-AIPR ¥200 4975479193514	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-7430	HEM-FSM50● ¥3,000 4975479409707	—	—	—	—	—	HEM-7430-AIPR ¥200 4975479189470	—
HEM-7500F HEM-7510C	HEM-FSM50● ¥3,000 4975479409707	—	—	—	—	—	HEM-7500F-AIPR ¥200 4975479193491	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-7511T	HEM-FSM50● ¥3,000 4975479409707	—	—	—	—	—	HEM-7500F-AIPR ¥200 4975479193491	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-8713	—	HEM-FM31● ¥2,000 4975479409691	—	—	—	—	HEM-7320F-AIPR ¥200 4975479193514	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157
HEM-8721	—	—	—	HEM-CUFF-R24GY ¥2,000 4975479408151	HEM-CUFF-S24GY ¥2,000 4975479408175	—	HEM-7080-AIPR ¥200 4975479695124	—
HEM-9200T-JP	—	—	—	HEM-CUFF-R24GY ¥2,000 4975479408151	HEM-CUFF-S24GY ¥2,000 4975479408175	HEM-RML31● ¥2,000 4975479409721	HEM-7320F-AIPR ¥200 4975479193514	HHP-AM01 ¥2,500 4975479196157

※1 HCR-7800TはP.53に掲載しています。

体温計

ネプライザ・吸入器

体重体組成計

活動量計・歩数計

電動歯ブラシ

治療機器

マッサージ機器

補聴器

パルスオキシメータ

心電計

血圧計比較表

上腕式血圧計					
商品型式名	HBP-1320	HCR-7107	HEM-8712	HCR-7106	HCR-7402
メーカー希望小売価格(税別)	¥26,000	オープン価格			
メモリ(記憶機能)	前回値	90回	前回値	60回	2人×100回
腕帯タイプ	医家向け扇型腕帯	軟性腕帯		フィットカフ	
対象腕周	22～32cm SS/S/L/XLカフ(別売) 使用時:12～50cm	22～32cm 太腕/細腕用腕帯(別売)使用時:17～42cm		17～36cm	
アルコール消毒(カフ/本体)	●	—	—	—	—
腕の太さにあわせて正しく測定	●	●	●	●	●
正しく巻けたか確認できる	—	●	—	●	●
巻きやすい腕帯	—	—	—	●	●
比較画面	—	—	—	—	●
早朝高血圧確認機能	—	—	—	—	●
朝週/晩週平均値表示	—	—	—	—	●
血圧確認機能	—	●	—	●	●
平均値表示	—	●	—	●	●
耐衝撃性	●	—	—	—	—
聴診モード	●	—	—	—	—
時計機能	—	●	—	●	●
収納ケース	—	—	—	●	●
ACアダプタ対応	●(付属)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(付属)
電気の定格	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz 単3形アルカリ乾電池×4個			
OMRON connect 対応	—	—	—	—	—
対応スマートフォン	—	—	—	—	—
販売年	2021年	2021年	2015年	2019年	2019年
販売名	自動血圧計 HBP-1320	オムロン 上腕式血圧計 スタンダード19シリーズ	オムロン 上腕式血圧計 HEM-7120シリーズ	オムロン 上腕式血圧計 スタンダード19シリーズ	オムロン 上腕式血圧計 スタンダード19シリーズ
JANコード	4975479418723	4975479418839	4975479409851	4975479417412	4975479418525

※1 対応スマートフォンについては、55ページをご参照ください。

上腕式血圧計					
商品型式名	HEM-8731	HCR-7501T	HEM-7281T	HCR-7712T2	HCR-7612T2
メーカー希望小売価格(税別)	オープン価格				
メモリ(記憶機能)	2人×60回	100回	2人×100回		
腕帯タイプ	フィットカフ			e-フィットカフ	
対象腕周	17～36cm				
アルコール消毒(カフ/本体)	—	—	—	—	—
腕の太さにあわせて正しく測定	●	●	●	●	●
正しく巻けたか確認できる	●	●	●	●	●
巻きやすい腕帯	●	●	●	●	●
比較画面	—	—	—	●	●
早朝高血圧確認機能	—	—	●	●	●
朝週/晩週平均値表示	—	—	●	●	●
血圧確認機能	—	●	—	●	●
平均値表示	●	●	●	●	●
耐衝撃性	—	—	—	—	—
聴診モード	—	—	—	—	—
時計機能	●	●	●	●	●
収納ケース	—	●	●	●	●
ACアダプタ対応	●(別売)	●(別売)	●(付属)	●(付属)	●(付属)
電気の定格	AC100V 50/60Hz 単3形アルカリ乾電池×4個				
OMRON connect 対応	—	●	●	●	●
対応スマートフォン	—	iPhone・Android (Bluetooth®) 対応※1	iPhone・Android (Bluetooth®) 対応※1	iPhone・Android (Bluetooth®) 対応※1	
販売年	2013年	2019年	2016年	2024年	2024年
販売名	オムロン 上腕式血圧計 HEM-8731	オムロン 上腕式血圧計 スタンダード19シリーズ	オムロン 上腕式血圧計 HEM-7280シリーズ	オムロン 上腕式血圧計 HCR-7712T2	オムロン 上腕式血圧計 HCR-7612T2
JANコード	4975479409677	4975479417375	4975479409936	4975479424014	4975479424021

※1 対応スマートフォンについては、55ページをご参照ください。

血圧計比較表

上腕式血圧計 (全自動タイプ)				
商品型式名	HCR-1802	HCR-1602	HCR-1902T2	HEM-1000
メーカー希望小売価格(税別)	オープン価格			
メモリ(記憶機能)	2人×100回	2人×84回	2人×100回	2人×90回
腕帯タイプ	一体型(可動式)			
対象腕周	17~32cm			
正しい姿勢をお知らせ	●	—	●	—
可動式腕帯	●	●	●	●
早朝高血圧確認機能	●	●	●	—
朝週/晩週平均値表示	●	●	●	—
血圧確認機能	●	—	●	—
不規則脈波お知らせ	●	—	●	●
体動お知らせ	●	●	●	●
平均値表示	直近10分以内(最大2回分)	直近10分以内(最大3回分)	直近10分以内(最大2回分)	(最新3回分)
時計機能	●	●	●	●
ACアダプタ対応(付属)	●	●	●	●
電氣的定格	AC100V 50/60Hz 単2形アルカリ乾電池×4個	AC100V 50/60Hz 単3形アルカリ乾電池×4個	AC100V 50/60Hz 単2形アルカリ乾電池×4個	AC100V 50/60Hz 単3形アルカリ乾電池×4個
その他の特徴	カフの開閉で電源を 自動ON / OFF	液晶バックライト (ACアダプタ使用時に点灯)	カフの開閉で電源を 自動ON / OFF	—
OMRON connect 対応	—	—	●	—
対応スマートフォン	—	—	iPhone・Android (Bluetooth®) 対応※1	—
販売名	オムロン 上腕式血圧計 HEM-1026シリーズ	オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1010	オムロン 上腕式血圧計 HEM-1026シリーズ	オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1000
JANコード	4975479418938	4975479418860	4975479418884	4975479405990

手首式血圧計					
商品型式名	HEM-6183	HEM-6161	HEM-6230	HEM-6231T2-JE	HEM-6232T
メーカー希望小売価格(税別)	オープン価格				
メモリ(記憶機能)	60回	30回	2人×100回	90回	2人×100回
腕帯タイプ	ぴったりフィットするカフ (対象手首周:13.5~21.5cm)		巻きやすい薄型カフ (対象手首周:13.5~21.5cm)		
手首の太さにあわせて正しく測定	—	—	●	●	●
正しく巻けたか確認できる	●	—	●	●	●
正しい姿勢をお知らせ	●	—	●	●	●
巻きやすい薄型カフ	—	—	●	●	●
早朝高血圧確認機能	●	—	●	●	●
朝週平均値表示	●	—	●	●	●
血圧確認機能	●	—	●	●	●
不規則脈波お知らせ	●	●	●	●	●
体動お知らせ	●	—	●	●	●
サイレント測定	—	—	●	●	●
平均値表示	—	—	●	●	●
1.5秒クイックスタート	●	●	●	●	●
時計機能	●	—	●	●	●
収納ケース	●	●	●	●	●
電氣的定格	単4形アルカリ乾電池×2個				
OMRON connect 対応	—	—	—	●	●
対応スマートフォン	—	—	—	iPhone・Android (Bluetooth®) 対応※1	
販売名	オムロン 自動血圧計 HEM-6180シリーズ	オムロン 自動血圧計 HEM-6160シリーズ	オムロン 自動血圧計 HEM-6230シリーズ	オムロン 手首式血圧計 HEM-6230シリーズ	オムロン 手首式血圧計 HEM-6230シリーズ
JANコード	4975479417054	4975479417108	4975479417030	4975479418907	4975479417153

※1 対応スマートフォンについては、55ページをご参照ください。



● スマートフォンとBluetooth®通信をおこなう機器は電波を使用しています。植込み型医療機器を装着されている方は、医師の指導のもとご使用ください。
● 航空機内や病院など無線通信が禁止された場所で使用しないでください。



● 糖尿病、高脂血症、重度の高血圧などにより、動脈硬化が進行している場合は、上腕と手首に血圧差が出る場合があります。
● 重度の血管障害や血液疾患のある方は、医師の指導のもとご使用ください。
● 本製品は日本国内専用です。Use only in Japan.
● 製品の保障は、日本国内での使用の場合に限りです。
Product warranty is valid only in Japan.
● ご使用の際は、取扱説明書をよく読みのお使いください。

2.4 XX 1

体温計 けんおんくん シリーズ

使いやすさと作業効率にこだわった
20秒検温※の病院向け体温計 ※予測検温(平均)

オムロン 電子体温計 MC-1600W-HP **医家向け**
メーカー希望小売価格 **¥3,250(税別)**

わき専用

本体質量: 約14g(電池含む)
外形寸法: 幅20×長さ136.8×厚さ12.7mm
医療機器認証番号: 223AGBZX00181000
一般的名称: 電子体温計 管理医療機器

オムロン 電子体温計 MC-1600W-HPS(6本セット)
メーカー希望小売価格 **¥17,500(税別)**
JANコード(6本セット): 4975479425646

特長がよくわかる!
製品紹介動画

1分



おすすめ品



20秒
予測検温

予測+実測※1

防水※2/アルコール消毒対応

収納ケース(電源ON/OFF機能)

フラット感温部

ブザー

電池寿命10,000回以上※3

※1 実測検温: 約10分 ※2 JIS T1140:2014に適合した防浸形 ※3 予測検温時



アルコール消毒が可能な電子体温計

オムロン 電子体温計 **医家向け**
MC-141W-HP
メーカー希望小売価格 **¥2,100(税別)**

わき・口中

本体質量: 約11g(電池含む)
外形寸法: 幅18.4×長さ130×厚さ11.3mm
医療機器認証番号: 220AGBZX00016A01
一般的名称: 電子体温計 管理医療機器

携帯に便利なクリップ付きケース



10分
実測検温
(わき)

実測式

防水※1/アルコール消毒対応

収納ケース(クリップ付き)

前回値メモリ

オートパワーオフ(約30分後)

電池交換可能

ブザー

電池LR41×1(約1,100回)

※1 JIS T1140:2014に適合した防浸形



体温計 けんおんくん シリーズ

約15秒※1のスピード検温 大きな文字で、測定結果が見やすい

オムロン 電子体温計

MC-687 けんおんくん

オープン価格

わき専用

本体質量：約14g(電池含む)
外形寸法：幅20.1×長さ136.8×厚さ12.8mm
医療機器認証番号：229AGBZX00037000
一般の名称：電子体温計 管理医療機器



15秒
予測検温

予測+実測※1

前回値メモリ

抗菌※2

収納ケース

ブザー

オートパワーオフ

フラット感温部

電池交換可能

電池CR1220×1(約15000回※3)

※1 実測検温:約10分 ※2 抗菌樹脂を使用 ※3 予測検温時

家族みんなで使うならコレ 20秒検温※1 + 大型表示

オムロン 電子体温計

MC-681 けんおんくん

メーカー希望小売価格 **¥2,500(税別)**

わき専用

本体質量：約18g
外形寸法：幅30×長さ110×厚さ14mm
医療機器認証番号：225ACBZX00050000
一般の名称：電子体温計 管理医療機器



20秒
予測検温

予測+実測※1

前回値メモリ

抗菌※2

収納ケース

ブザー

オートパワーオフ

フラット感温部

電池交換可能

電池CR2016×1(約15000回※3)

※1 実測検温:約10分 ※2 抗菌樹脂を使用 ※3 予測検温時

はさみやすく、
ずれにくい
フラット感温部



しっかり検温30秒

オムロン 電子体温計

MC-6740 けんおんくん

オープン価格

わき専用

本体質量：約14g(電池含む)
外形寸法：幅20.4×長さ138×厚さ12.5mm
医療機器認証番号：230AGBZX00059000
一般の名称：電子体温計 管理医療機器



30秒
予測検温

予測+実測※1

前回値メモリ

抗菌※2

収納ケース

洗える先端

オートパワーオフ

フラット感温部

電池交換可能

電池CR1220(約12,000回※3)

※1 実測検温:約10分 ※2 抗菌樹脂を使用 ※3 予測検温時

丸洗いができて清潔な防水タイプ※1

オムロン 電子体温計

MC-171W けんおんくん

メーカー希望小売価格 **¥1,600(税別)**

わき・口中

本体質量：約13g(電池含む)
外形寸法：幅19.6×長さ129.7×厚さ13.2mm
医療機器認証番号：219AGBZX00040000
一般の名称：電子体温計 管理医療機器



10分
実測検温
(わき)

実測式

前回値メモリ

防水※1

抗菌※2

収納ケース

ブザー

オートパワーオフ

フラット感温部

電池交換可能

※1 JIS T1140:2014に適合した防浸形 ※2 抗菌樹脂を使用

体温計 けんおんくん シリーズ

お知らせブザーが付いた、スタンダードタイプ

オムロン 電子体温計

MC-170 けんおんくん

メーカー希望小売価格 **¥1,250(税別)**

わき・口中

本体質量：約13g(電池含む)
外形寸法：幅19.6×長さ129.7×厚さ13.2mm
医療機器認証番号：219AGBZX00039000
一般の名称：電子体温計 管理医療機器



10分
実測検温
(わき)

実測式

前回値メモリ

抗菌※1

収納ケース

ブザー

オートパワーオフ

フラット感温部

電池交換可能

電池LR41×1(約1100回)

※1 抗菌樹脂を使用

約20秒の予測検温 Bluetooth通信機能で、検温結果をスマホ管理

オムロン 電子体温計

MC-6810T2

オープン価格

わき専用

本体質量：約30g(電池含む)
外形寸法：幅32.6×長さ122×厚さ16.6mm
医療機器認証番号：303AGBZX00094000
一般の名称：電子体温計 管理医療機器

connect
OMRON



20秒
予測検温

予測+実測※1

メモリ(最大60回※2)

収納ケース

ブザー

オートパワーオフ

フラット感温部

電池交換可能

電池CR2032×1(約1年※3)

Bluetooth®通信対応

※1 実測検温:約10分

※2 (本体表示は前回値のみ) 予測検温のみの場合。実測で測定した場合は最大30件
※3 1日1回測定、1日1回データ転送した場合

◎植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

使い方と測定結果を音声でお知らせ

オムロン 音声付電子体温計

MC-174V けんおんくん

メーカー希望小売価格 **¥9,000(非課税)**

わき・口中

本体質量：約26g(電池含む)
外形寸法：幅34.9×長さ132.5×厚さ21.8mm
医療機器認証番号：222AGBZX00273000
一般の名称：電子体温計 管理医療機器



10分
実測検温
(わき)

実測式

収納ケース

ブザー

オートパワーオフ

フラット感温部

電池交換可能

電池CR2032×1(約350回)

やわらかくフィットして、すばやく検温 赤ちゃんにうれしい体温計が登場

オムロン 電子体温計

MC-682 けんおんくん

メーカー希望小売価格 **¥3,800(税別)**

わき専用

本体質量：約25g(電池含む)
外形寸法：幅41×長さ108×厚さ19mm
医療機器認証番号：225ACBZX00053000
一般の名称：電子体温計 管理医療機器



15秒
予測検温

バックライト

予測+実測※1

日時付10回メモリ

抗菌※2

収納ケース

ブザー(ON/OFF切替可)

オートパワーオフ

電池交換可能

電池CR2032×1(約2200回※3)

※1 実測検温:約10分 ※2 抗菌樹脂を使用 ※3 予測検温時

婦人用体温計

朝の10秒※2でわかる、今日のワタシ

オムロン 婦人用電子体温計
MC-652LC-W(ホワイト)
BW(ブラウン) / PK(ピンク)
オープン価格

口中専用

本体質量：約33g(収納ケース、電池含む)
外形寸法：幅39×長さ103×厚さ16mm
医療機器認証番号：223AGBZX00261A01
一般名称：電子体温計 管理医療機器

connect
OMRON

10秒
予測検温



W(ホワイト) BW(ブラウン) PK(ピンク)

めざましアラーム※1

バックライト

予測+実測※2

前回値メモリ※3

抗菌※4

収納ケース(一体型)

ブザー

フラット感温部

電池交換可能

電池 CR2032×1(約9カ月)

Bluetooth®通信対応

※1 スマートフォンからの設定が必要になります

※2 予測検温：約10秒(平均)、実測検温：約5分

※3 本体には40日分メモリ ※4 抗菌樹脂を使用

◎ 植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。

◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

忙しい朝も10秒で測定できる シンプル婦人体温計

オムロン 電子体温計
MC-6830L
オープン価格

口中専用

本体質量：約14g(電池含む)
外形寸法：幅20.1×長さ136.8×厚さ12.8mm
医療機器認証番号：230AGBZX00058000
一般名称：電子体温計 管理医療機器

10秒
予測検温



予測+実測※1

バックライト

前回値メモリ

抗菌※2

収納ケース

ブザー

オートパワーオフ

フラット感温部

電池交換可能

電池CR1220(約1100回※3)

※1 実測検温：約5分 ※2 抗菌樹脂を使用 ※3 予測検温時

基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ

オムロン 電子体温計
MC-172L けんおんくん
メーカー希望小売価格 ¥1,850(税別)

口中専用

本体質量：約13g(電池含む)
外形寸法：幅19.6×長さ129.7×厚さ13.2mm
医療機器認証番号：219AGBZX00041000
一般名称：電子体温計 管理医療機器

5分
実測検温
(くち)



実測式

前回値メモリ

抗菌※1

収納ケース

ブザー

オートパワーオフ

フラット感温部

電池交換可能

電池LR41×1(約1100回)

※1 抗菌樹脂を使用

耳式体温計

最短1秒で検温、かわいい キャラクター付きの耳式体温計

オムロン 耳式体温計
MC-581 けんおんくんミミ
メーカー希望小売価格 ¥4,400(税別)

在庫限り

耳専用

本体質量：約50g(電池含む)
外形寸法：幅45×高さ94×奥行き58mm
医療機器認証番号：21200BZZ00539A01
一般名称：電子体温計 管理医療機器



©1976,2002 SANRIO CO.,LTD
APPROVAL NO.53051508



携帯に便利な
収納ケース付き

1秒
実測検温
(耳)

実測式(耳)

収納ケース

オートパワーオフ

ブザー

電池交換可能

電池CR2032×1(約5000回)

体温計比較表

体温計				
				
こんな方におすすめ	医家向け		日常	
商品型式名	MC-1600W-HP	MC-141W-HP	MC-687	MC-681
メーカー希望小売価格(税別)	¥3,250	¥2,100	オープン価格	¥2,500
測定方式	予測＋実測	実測	予測＋実測	
測定部位	わき	わき・口中	わき	
体温表示	3桁＋℃表示、0.1℃毎			
測定時間(目安)	予測:平均約20秒 実測:約10分	わき10分/口中5分	予測:平均約15秒 実測:約10分	予測:平均約20秒 実測:約10分
メモリ機能	—	前回値		
防水	●	●	—	—
アルコール消毒	●	●	—	—
お知らせブザー	●	●	●	●
お知らせランプ	—	—	●	—
オートパワーオフ	—	●	●	●
電気の定格	アルカリボタン電池LR41×2個 (交換不可)	アルカリマンガンボタン電池LR41 ×1個	リチウム電池CR1220×1個	リチウム電池CR2016×1個
電池寿命(目安)	10,000回以上(予測検温) 約2,000回(実測検温)	約1,100回(実測検温)	約5,000回(予測検温) 約1,700回(実測検温)	約15,000回(予測検温) 約3,000回(実測検温)
販売名	オムロン 電子体温計 MC-1600W-HP	オムロン 電子体温計 MC-141W-HP	オムロン 電子体温計 MC-687	オムロン 電子体温計 MC-681
JANコード	4975479425622	4975479425387	4975479425936	4975479425707

体温計				
こんな方におすすめ	日常			データ管理したい方に
商品型式名	MC-6740	MC-171W	MC-170	MC-6810T2
メーカー希望小売価格(税別)	オープン価格	¥1,600	¥1,250	オープン価格
測定方式	予測＋実測	実測		予測＋実測
測定部位	わき	わき・口中		わき
体温表示	3桁＋℃表示、0.1℃毎			
測定時間(目安)	予測:平均約30秒 実測:約10分	わき10分/口中5分		予測:平均約20秒 実測:約10分
メモリ機能	前回値			予測値60件・実測値30件※1
防水	—	●	—	●
アルコール消毒	—	—	—	●
お知らせブザー	●	●	●	●
お知らせランプ	—	—	—	—
オートパワーオフ	●	●	●	●
通信対応	—	—	—	iPhone・Android (Bluetooth®) 対応※2
電気の定格	リチウム電池CR1220×1個	アルカリマンガンボタン電池LR41×1個		リチウム電池CR2032×1個
電池寿命(目安)	約12,000回(予測検温) 約2,000回(実測検温)	約1,100回 (実測検温:10分/回)		約1年 (1日1回測定、1日1回データ転送)
販売名	電子体温計 MC-6740シリーズ	オムロン 電子体温計 MC-171W	オムロン 電子体温計 MC-170	電子体温計 MC-6810シリーズ
JANコード	4975479426018	4975479425257	4975479425240	4975479426094

※1 本体表示は前回値のみ ※2 対応スマートフォンについては、55ページをご参照ください。

体温計比較表

体温計			 在庫限り
こんな方におすすめ	日常	赤ちゃんの検温に	赤ちゃんから大人まで耳ですばやく検温
商品型式名	MC-174V	MC-682	MC-581
メーカー希望小売価格(税別)	¥9,000(非課税)	¥3,800	¥4,400
測定方式	実測	予測+実測	実測
測定部位	わき・口中	わき	耳
体温表示	3桁+℃表示、0.1℃毎		
測定時間(目安)	わき10分/口中5分	予測:平均約15秒 実測:約10分	耳1秒
メモリ機能	—	日時付10回メモリ	—
防水	—	—	—
アルコール消毒	—	—	—
お知らせブザー	●	●(ON/OFF切替可)	—
お知らせランプ	—	●	●
オートパワーオフ	●	●	●
電気の定格	リチウム電池CR2032×1個		
電池寿命(目安)	約350回 (実測検温:10分/回)	約2,200回(予測検温) 約400回(実測検温)	約5,000回 (23℃環境下で連続測定の場合)
販売名	オムロン 音声付電子体温計 MC-174V	オムロン 電子体温計 MC-682	オムロン 耳式体温計 MC-581
JANコード	4975479425578	4975479425714	4975479424489

婦人用体温計			
こんな方におすすめ	基礎体温チェック		
商品型式名	MC-652LC	MC-6830L	MC-172L
メーカー希望小売価格(税別)	オープン価格		¥1,850
測定方式	予測+実測		実測
測定部位	口中		
体温表示	4桁+℃表示、0.01℃毎		
測定時間(目安)	予測:平均約10秒 実測:約5分		口中5分
メモリ機能	40日分	前回値	
防水	—	—	—
アルコール消毒	—	—	—
お知らせブザー	●	●	●
オートパワーオフ	—	●	●
通信対応	iPhone・Android (Bluetooth®) 対応※1	—	—
電気の定格	リチウム電池CR2032×1個	リチウム電池CR1220×1個	アルカリマンガンボタン電池LR41 ×1個
電池寿命(目安)	約9ヵ月(室温23℃、 1日1回/5分間検温、 1日1回データ転送を おこなった場合)	約1,100回(予測検温) 約500回(実測検温)	約1,100回 (実測検温:5分/回)
販売名	オムロン 婦人用電子体温計 MC-652LC	婦人用電子体温計 MC-6830L MC-6830Lシリーズ	オムロン 電子体温計 MC-172L
JANコード	[ホワイト] 4975479425776 [ブラウン] 4975479425783 [ピンク] 4975479425790	4975479425998	4975479425264

※1 対応スマートフォンについては、55ページをご参照ください。

ネブライザ

作用槽を本体から分離できる独自の新構造で洗浄・消毒性が高く衛生的

オムロン 超音波式ネブライザ NE-U780-J2

メーカー希望小売価格 ￥115,000(税別)

本体質量：約2.3kg

外形寸法：幅295×高さ219×奥行き196mm

医療機器届出番号：26B1X10002000039

一般的名称：超音波ネブライザ

一般医療機器

REMOVABLE
TANK



特長がよくわかる！
製品紹介動画

1分



おすすめ品

丸ごと消毒ができるREMOVABLE TANKを採用

REMOVABLE TANKとは？

オムロン独自の技術により、本体からの分離を可能にした新構造の作用槽です。これにより作用槽を単独で洗浄・消毒することが可能になり衛生面でも優れた効果を発揮します。



お手入れ簡単

凹凸が少なくお手入れしやすい本体デザイン。接触の多い表示部は汚れの付着を抑え、清掃性の高いシートスイッチを採用。

エアフィルタやファンの取り外しが簡単にでき、汚れがつきにくい内部形状のため、風路の掃除も簡単です。



ネブライザは、医師の指導のもとで薬液吸入するための医療用機器です。用途を誤ると危険なため、必ず専門の医師の指導に従ってください。また、薬液の種類、用量、用法についても、医師の指導に従ってください。※水は吸入しないようご注意ください。一般家庭での、のど、鼻の粘膜の加湿を目的とした家庭用吸入器の用途には適しません。
※商品により噴霧に適さない薬剤もあります。

ネブライザ

長寿命モータ採用の医療機関向けモデル

オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C29 メーカー希望小売価格 ￥33,000(税別)

本体質量：約2.3kg(本体のみ)
外形寸法：幅約186×高さ180×奥行き216mm
医療機器届出番号：26B1X10002000008
一般的名称：非加熱式ネブライザ
一般医療機器



パーツを本体に収納可能



ご家庭用スタンダードモデル

オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C28 メーカー希望小売価格 ￥20,000(税別)

本体質量：約1.9kg(本体のみ)
外形寸法：幅170×高さ103×奥行き182mm
医療機器届出番号：26B1X10002000007
一般的名称：非加熱式ネブライザ
一般医療機器

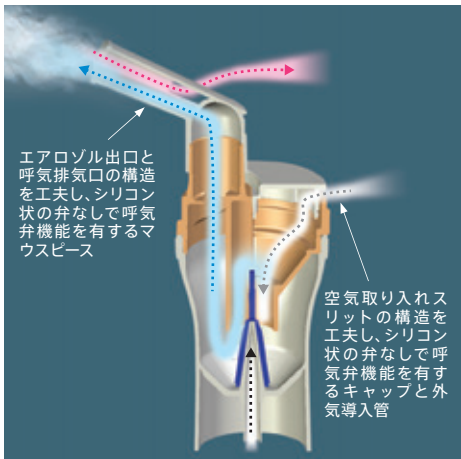


収納ケース付



特長がよくわかる！
製品紹介動画

1分



キッズアクセサリ
装着可能

キッズアクセサリ 各¥500(税別)

くま 型番:NE-KD1
うさぎ 型番:NE-KD2
ぞう 型番:NE-KD3

独自の高効率V.V.T.※1ネブライザキットの採用により、空气中に排出される無駄なエアロゾルを最小化します。また従来多く利用されているシリコン弁を用いず、全てポリプロピレンでできているので洗浄しやすいのが特長です。

※1 Virtual Valve Technology(バーチャル・バルブ・テクノロジー)

「使い捨てメッシュ」採用 衛生的でお手入れが楽に

オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U200 オープン価格

本体質量：約110g(電池含まず)
外形寸法：幅45×高さ125×奥行き70mm
医療機器届出番号：26B1X10002000043
一般的名称：超音波ネブライザ
一般医療機器

毎回新品に交換できるディスポーザブルタイプのメッシュを採用



▼
お薦め品
▲

特長がよくわかる！
製品紹介動画



1分

傾けても使える軽量・コンパクトモデル

オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U100 メーカー希望小売価格 ￥28,000(税別)

本体質量：約120g(電池含まず)
外形寸法：幅38×高さ130×奥行き60mm
医療機器届出番号：26B1X10002000040
一般的名称：超音波ネブライザ
一般医療機器

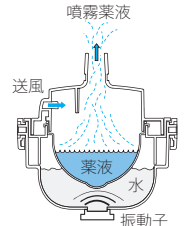
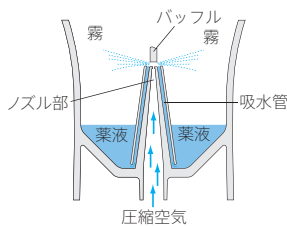
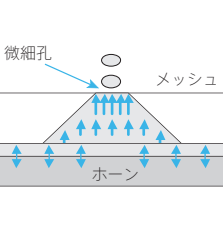
持ち運びに便利な電池式
専用ACアダプタNEB-AC-10(別売)の使用も可能



特長がよくわかる！
製品紹介動画



ネブライザ比較表

					
商品型式名	NE-U780-J2	NE-C29	NE-C28	NE-U200	NE-U100
メーカー希望小売価格(税別)	¥115,000	¥33,000	¥20,000	オープン価格	¥28,000
外形寸法(W×H×D mm)	約295×219×196	約186×180×216	約170×103×182	約45×125×70	約38×130×60
本体質量(電池含まず)	約2.3kg	約2.3kg (本体のみ)	約1.9kg (本体のみ)	約110g (電池含まず)	約120g (電池含まず)
医療機器届出番号	26B1X10002000039	26B1X10002000008	26B1X10002000007	26B1X10002000043	26B1X10002000040
噴霧粒子径分布	MMAD 約6.0μm※1	MMD約5μm※2	MMD約5μm※2	MMAD 約5μm※2	MMAD5μm以下※2
噴霧方式	超音波式	コンプレッサー式		メッシュ式	
超音波周波数	約1.63MHz	—	—	約180kHz	—
噴霧能力※3	3mL/分(風量10、霧化量10 設定時) 0.5mL/分(風量1、霧化量1 設定時)	約0.4mL/分 (キャップなし)		約0.25mL ~ 0.90mL/分※2	
薬液容量	最大150mL (補液ボトル使用時:最大1000mL)	最大7mL		約10mL	
適正薬液量※4	10mL~150mL※6	約2mL~7mL		約2mL~10mL	
薬液ボトル残液量※5	2mL (小容量霧化アダプタ使用時)※7	約0.5mL		約0.5mL	
定格電源	AC100V-240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz (専用アダプタ) 単3形アルカリ乾電池×2個 単3形ニッケル水素電池×2個	
消費電力	65-85VA	58W		1.2W	
販売名	オムロン 超音波式ネブライザ NE-U780-J2	オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C29	オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C28	オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U200	オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U100
JANコード	4975479404764	4975479404511	4975479404504	4975479404641	4975479404634
噴霧の仕組み	超音波式	コンプレッサー式		メッシュ式	
					

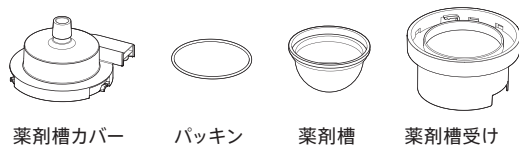
※1 (EN13644-1に準拠。)NaF水溶液(30mL)を用いて測定した社内データの代表値 ※2 全粒子径の50% (EN13544-1に準拠。自社測定での代表値) 常温(23℃、65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時。 ※3 噴霧能力:生理食塩水でのデータ。薬液の種類により変化します。 ※4 適正薬液量:機器が仕様通り噴霧能力を発揮する薬液量。薬液の種類により変化します。
※5 自社代表値。薬液ボトル(薬剤槽)の残液量は薬液の種類によって異なります。 ※6 別売の補液ボトル使用時:1000mL、小容量霧化アダプタ使用時:2mL~12mL ※7 残液量は薬液の種類や、風量/霧化量調節によって異なります。

【殺菌・消毒について】殺菌・消毒については各製品および消毒液の取扱説明書、注意事項に従ってください。

【ネブライザの材質について】ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂) PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) PE(ポリエチレン樹脂) PC(ポリカーボネート樹脂) PMP(ポリメチルペンテン樹脂) PP(ポリプロピレン樹脂) PS(ポリスチレン樹脂) PVC(ポリ塩化ビニール系樹脂) TPE(熱可塑性エラストマー) PET(ポリエチレンテレフタレート樹脂) PVA(酢酸ビニール樹脂) PSF(ポリサルホン樹脂) EVA(エチレン酢酸ビニール樹脂) SEBS(スチレン系エラストマー樹脂) PA(ポリアミド樹脂) PPO(ポリフェニレンオキサイド樹脂) PU(ポリウレタン) SI(シリコン) PSU(ポリフェニルスホン樹脂)


ネブライザ〈オムロン 超音波式ネブライザ NE-U780 別売品〉

NE-U780-J2/ U780



薬剤槽カバー パッキン 薬剤槽 薬剤槽受け

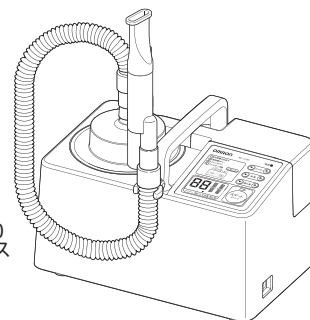霧化セット※パッキンは1個入りです。

NEB-HS-L70
耐熱吸気ホース

★はNE-U780-J2の本体標準付属品です。

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	★霧化セット	PMP/PP/ シリコン ゴム	NEB-NZU-78 4975479197055	¥3,000
	薬剤槽カバー ※パッキン付き	PMP/ シリコン ゴム	NEB-MCC-78 4975479197123	
	パッキン	シリコン ゴム	NEB-SP-78 4975479197024	¥300
	薬剤槽 【5個入り】	PP	NE-U12-1 4975479173677	
	薬剤槽受け	PP	NEB-MCH-78 4975479197130	¥800
	★作用槽	ABS/ PPS	NEB-RWT-78J2 4975479199431	
	作用槽※1	ABS/ PPS	NEB-RWT-78 4975479197031	¥25,000
	★ハンドルカバー	ABS	NEB-HC-78 4975479197543	
	小容量 霧化アダプタ	PMP	NEB-SCUP-78 4975479197048	¥500
	長時間 霧化用カバー	PMP/ シリコン ゴム	NEB-LMCC-78 4975479197154	
	長時間 霧化カバー用 キャップ	シリコン ゴム	NEB-CAP-78 4975479196997	¥650
	② 架台 左図①※2	ステンレス	NEB-CART-78 4975479197147	
	① 補液セット 左図②	PP/ シリコンゴム/ ステンレス	NE-U10-11 4975479173509	¥4,000
	マウスピース (逆止弁付き) 【5個入り】	PP	NEB-MPSS-78 4975479197093	
	★マウスピース (逆止弁付き)	PP	NEB-MPS-78 4975479197116	¥400
	吸入マスク(大) 【3個入り】	TPE/ゴム	NEB-MSILS-78 4975479197079	
	★吸入マスク(大)	TPE/ゴム	NEB-MSIL-78 4975479197109	¥1,200
	吸入マスク(小) 【3個入り】	TPE/ゴム	NEB-MSISS-78 4975479197062	
	吸入マスク(小)	TPE/ゴム	NEB-MSIS-78 4975479197086	¥1,200


写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	ノーズピース (ソフト) 【20個入り】	TPE	NEB-NPSS-78 4975479196898	¥15,000
	ノーズピース (ソフト) 【5個入り】	TPE	NEB-NPS-78 4975479196911	
	★ホースホルダー	TPC	NEB-HH-78 4975479197178	¥360
	★耐熱吸気ホース M (70cm) カフス付	TPE	NEB-HS-L70 4975479196935	
	耐熱吸気ホース L (150cm) カフス付	TPE	NEB-HS-L15 4975479196928	¥4,500
	耐熱吸気ホース M (70cm) カフスなし	TPE	NEB-HS2-L70 4975479196959	
	耐熱吸気ホース L (150cm) カフスなし	TPE	NEB-HS2-L15 4975479196942	¥4,000
	耐熱カフス	TPE	NEB-CF-78 4975479196966	
	ディスポホース 30m (使い捨てタイプ)	PE	NEB-DHS2-L300 4975479197161	¥12,000
	★送風ファン カバー	ABS	NEB-ADC-78 4975479197000	
	細菌フィルタ用 送風ファンカバー	ABS	NEB-BFC-78 4975479196980	¥1,200
	★ファン	PP	NE-U17-11 4975479177903	
	★エアフィルタ セット	PP/PS	NEB-AFS-78 4975479197017	¥450
	エアフィルタ 【5個入り】	PS	NE-U17-4P2 4975479177781	
	★保護フィルタ ケースセット	ABS/PS	NEB-PFS-78 4975479198571	¥450
	保護フィルタ 【5個入り】	PS	NEB-PF-78 4975479198564	
	★電源コード	PVC	NE-U12-28 4975479582646	¥1,500
	★取扱説明書		NEB-MA-78 4975479196904	

※1 この作用槽はNE-U780専用です。


※2 吸気ホースとマウスピースは含まれません。

ネブライザ〈オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C29 別売品〉

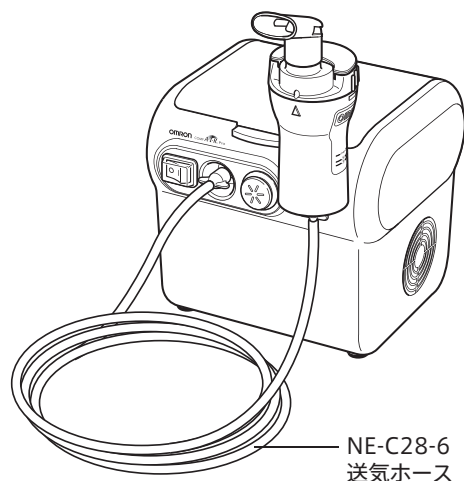NE-C29

NE-C28-1
ネブライザキットNE-C28-6
送気ホース

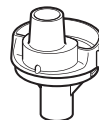キャップ



外気導入管



吸水管／バップル



薬液ボトル


★は本体標準付属品です。

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	★ネブライザキット	PP (耐熱)	NE-C28-1	¥1,200
			4975479185601	
	キャップ	PP (耐熱)	NE-C28-1P4	¥300
			4975479185649	
	外気導入管	PP (耐熱)	NE-C28-1P3	¥500
			4975479185632	
	吸水管／ バップル 【2個入り】	PP (耐熱)	NE-C28-1P2	¥500
			4975479185625	
	薬液ボトル	PP (耐熱)	NE-C28-1P	¥400
			4975479185618	
	★送気ホース	ホース： シリコン エアブラ グ：PP (耐熱)	NE-C28-6	¥1,000
			4975479185700	
	★マウスピース	PP (耐熱)	NE-C28-3P	¥200
			4975479185670	
	マウスピース 【5個入り】	PP (耐熱)	NE-C28-3	¥800
			4975479185663	
	ノズルピース (ソフトタイプ) 【5個入り】	PVC	NE-C10-10P	¥1,000
			4975479581618	
	ノズルピース (ソフトタイプ) 【20個入り】	PVC	NE-C10-10	¥3,500
			4975479170874	
	吸入マスク (大)	SEBS ひも： ゴム	NE-U10-1P	¥1,200
			4975479582127	
	吸入マスク (大) 【3個入り】	SEBS ひも： ゴム	NE-U10-1	¥3,000
			4975479170492	

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	★吸入マスク(小)	SEBS ひも： ゴム	NE-U10-2P	¥1,200
			4975479582226	
	吸入マスク(小) 【3個入り】	SEBS ひも： ゴム	NE-U10-2	¥3,000
			4975479170508	
	★吸入マスク (小)用 アダプタ	PP (耐熱)	NE-C28-4	¥600
			4975479185687	
	★収納カバー	ABS	NE-C29-SCC	¥1,500
			4975479190384	
	★エアフィルタ セット 【5個入り】	ポリエ ステル	NE-C28-2	¥300
			4975479185656	
	★エアフィルタ カバー	ABS	NE-C28-5	¥200
			4975479185694	
	★本体ゴム足 【4個入り】	PUR (ポリウレ タン)	NE-C29-RFT	¥200
			4975479190377	
	ネブライザキット キッズアクセサリ クマ		NE-KD1	¥500
			4975479191343	
	ネブライザキット キッズアクセサリ ウサギ		NE-KD2	¥500
			4975479191350	
	ネブライザキット キッズアクセサリ ゾウ		NE-KD3	¥500
			4975479191367	
	★取扱説明書		NE-C29-MA	¥300
			4975479185731	

ネブライザ〈オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C28 別売品〉

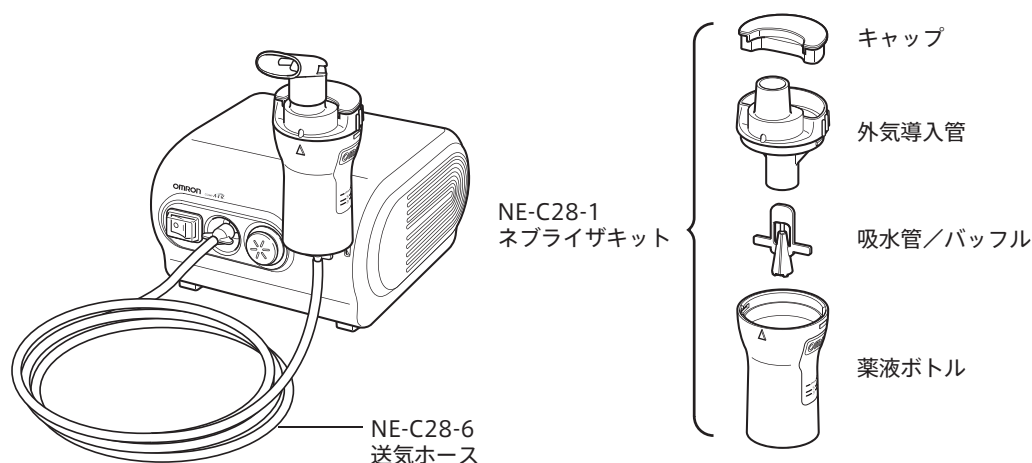NE-C28




★は本体標準付属品です。

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	★ネブライザキット	PP (耐熱)	NE-C28-1 4975479185601	¥1,200
	キャップ	PP (耐熱)	NE-C28-1P4 4975479185649	¥300
	外気導入管	PP (耐熱)	NE-C28-1P3 4975479185632	¥500
	吸水管／ バップル 【2個入り】	PP (耐熱)	NE-C28-1P2 4975479185625	¥500
	薬液ボトル	PP (耐熱)	NE-C28-1P 4975479185618	¥400
	★送気ホース	ホース： シリコン エアブラ グ：PP (耐熱)	NE-C28-6 4975479185700	¥1,000
	★マウスピース	PP (耐熱)	NE-C28-3P 4975479185670	¥200
	マウスピース 【5個入り】	PP (耐熱)	NE-C28-3 4975479185663	¥800
	ノーズピース (ソフトタイプ) 【5個入り】	PVC	NE-C10-10P 4975479581618	¥1,000
	ノーズピース (ソフトタイプ) 【20個入り】	PVC	NE-C10-10 4975479170874	¥3,500
	吸入マスク (大)	SEBS ひも： ゴム	NE-U10-1P 4975479582127	¥1,200
	吸入マスク (大) 【3個入り】	SEBS ひも： ゴム	NE-U10-1 4975479170492	¥3,000

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	★吸入マスク(小)	SEBS ひも： ゴム	NE-U10-2P 4975479582226	¥1,200
	吸入マスク(小) 【3個入り】	SEBS ひも： ゴム	NE-U10-2 4975479170508	¥3,000
	★吸入マスク (小)用 アダプタ	PP (耐熱)	NE-C28-4 4975479185687	¥600
	★エアフィルタ セット 【5個入り】	ポリエ ステル	NE-C28-2 4975479185656	¥300
	★エアフィルタ カバー	ABS	NE-C28-5 4975479185694	¥200
	★本体ゴム足 【4個入り】	EPDM (エチレン- プロピレン- ジエンゴム)	NE-C28-RFT 4975479190391	¥200
	ネブライザキット キッズアクセサリ クマ		NE-KD1 4975479191343	¥500
	ネブライザキット キッズアクセサリ ウサギ		NE-KD2 4975479191350	¥500
	ネブライザキット キッズアクセサリ ゾウ		NE-KD3 4975479191367	¥500
	★キャリング バッグ		NE-C28-SOCA 4975479185717	¥2,000
	★取扱説明書		NE-C29-MA 4975479185724	¥300

ネブライザ〈オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U200 別売品〉

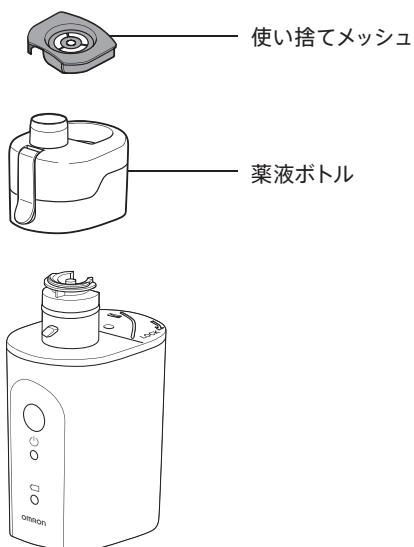NE-U200



★は本体標準付属品です。(使い捨てメッシュの標準付属品の個数は30個です。)


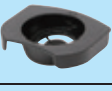
写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	★マウスピース	SEBS	NE-U22-1	¥200
			4975479179891	
	★薬液ボトル	シリコン/ PC	NEB-BTL-20	¥2,600
			4975479199097	
	★使い捨てメッシュ 60個セット	PC/ PPSU	NEB-DMC2-20	¥2,700
			4975479199073	
	専用ACアダプタ	PC	NEB-AC-20	¥2,000
			4975479199080	

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	吸入マスクL	PVC ひも:ゴム	NEB-MSLP	¥800
			4975479198908	
	吸入マスクL 3個セット	PVC ひも:ゴム	NEB-MSLP3-10	¥2,000
			4975479198892	
	★吸入マスクM	PVC ひも:ゴム	NEB-MSMP	¥800
			4975479198885	
	吸入マスクM 3個セット	PVC ひも:ゴム	NEB-MSMP3-10	¥2,000
			4975479198878	
	吸入マスクS	PVC ひも:ゴム	NEB-MSSP	¥800
			4975479198861	

ネブライザ〈オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U100 別売品〉

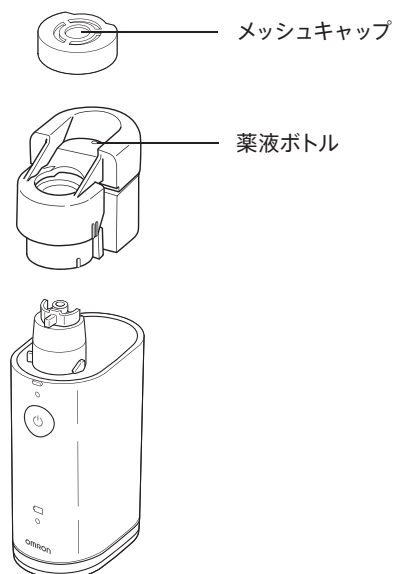NE-U100



★は本体標準付属品です。

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	★マウスピース	SEBS	NE-U22-1	¥200
			4975479179891	
	★マスクアダプタ	PC	NEB-MSA-10	¥500
			4975479198915	
	★薬液ボトル	PC/ チタン	NEB-BTL-10	¥2,600
			4975479198939	
	★メッシュキャップ	シリコン/ PC/ NiPd	NEB-MC-10	¥3,500
			4975479198922	
	ACアダプタ	PC	NEB-AC-10	¥2,000
			4975479198946	

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	吸入マスクL	PVC ひも:ゴム	NEB-MSLP	¥800
			4975479198908	
	吸入マスクL 3個セット	PVC ひも:ゴム	NEB-MSLP3-10	¥2,000
			4975479198892	
	★吸入マスクM	PVC ひも:ゴム	NEB-MSMP	¥800
			4975479198885	
	吸入マスクM 3個セット	PVC ひも:ゴム	NEB-MSMP3-10	¥2,000
			4975479198878	
	吸入マスクS	PVC ひも:ゴム	NEB-MSSP	¥800
			4975479198861	

ネブライザ〈オムロン 超音波式ネブライザ NE-U17 別売品〉

NE-U17

※本体の販売は終了しています。

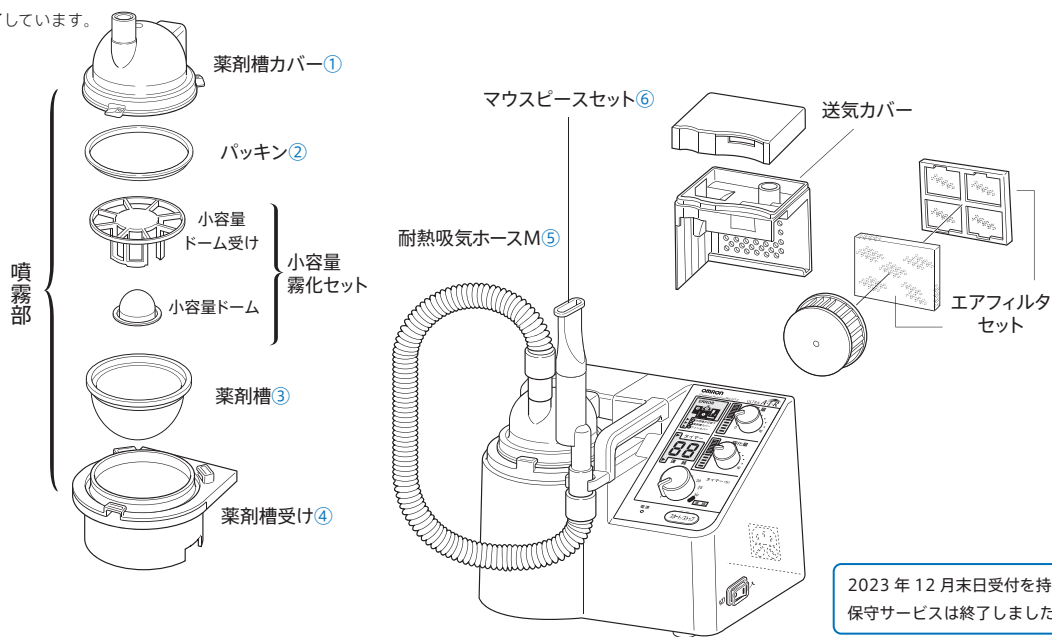


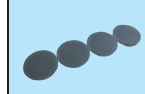
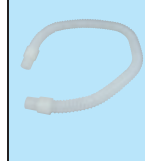
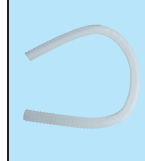
写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
上図イラスト参照 ①+②+③+④+⑤+ ⑥+カバーキャップ	吸気系セット ※パッキン、薬剤槽 は1個入り	PP/ABS /PMP /シリコン /SEBS	NE-U17-14	¥7,000 在庫限り
			4975479179006	
	カバーキャップ	シリコン	NE-U12-14	¥200 在庫限り
			4975479582509	
	パッキン	シリコン	NE-U17-5P4	¥300 在庫限り
			4975479180460	
	薬剤槽 【5個入り】	PP	NE-U12-1	¥2,000
			4975479173677	
	薬剤槽受け	ABS	NE-U17-5P2	¥800 在庫限り
			4975479177828	

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	ファンカバー	ABS	NE-U17-10	¥1,200 在庫限り
			4975479177842	
	ケースファン	ABS	NE-U17-10P2	¥300 在庫限り
			4975479177866	
	カバーファン	ABS	NE-U17-10P	¥1,000 在庫限り
			4975479177859	
	ファン	PP	NE-U17-11	¥300
			4975479177903	
	コネクタ	PMP	NE-U17-13P2	¥400 在庫限り
			4975479178436	
	小容量霧化 セット	ABS/ PP	NE-U17-1	¥500 在庫限り
			4975479177873	
	小容量ドーム 受け	ABS	NE-U17-1P	¥400 在庫限り
			4975479177880	
	エアフィルタ 【5個入り】	PS	NE-U17-4P2	¥1,200
			4975479177781	

ネブライザ〈オムロン 超音波式ネブライザ NE-U17 別売品〉

NE-U17

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	補液ハンガー 左図①	ステンレス	NE-U17-SMA	¥4,000 在庫限り
			4975479190322	
	補液セット 左図②	PP	NE-U10-11	¥4,000
			4975479173509	
	ノズポルト 【2個入り】	ステンレス	NE-U17-ST5	¥800 在庫限り
			4975479190339	
	本体固定用ネジ	ステンレス	NE-U17-ST52	¥400 在庫限り
			4975479190315	
	ノーズピース (ソフトタイプ) 【5個入り】	PVC	NE-C10-10P	¥1,000
			4975479581618	
	ノーズピース (ソフトタイプ) 【20個入り】	PVC	NE-C10-10	¥3,500
			4975479170874	
	ガラスオリーブ	ガラス	NE-U10-12	¥3,000 在庫限り
			4975479170584	
	吸入マスク (大)	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-1P	¥1,200
			4975479582127	
	吸入マスク (大) 【3個入り】	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-1	¥3,000
			4975479170492	
	吸入マスク (小)	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-2P	¥1,200
			4975479582226	
	吸入マスク (小) 【3個入り】	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-2	¥3,000
			4975479170508	
	小児用オリーブ (ガラス)	ガラス	NE-U10-21	¥3,000 在庫限り
			4975479170614	
	吸入マスク (ガラス)	ガラス	NE-U10-3	¥5,000 在庫限り
			4975479170522	


写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	本体ゴム足 【4個入り】	PUR (ポリウレタン)	NE-U17-RFT	¥400 在庫限り
			4975479190353	
	電源コード	PVC	NE-U12-28	¥1,500
			4975479582646	
	耐熱吸気ホース S(30cm) カフス付	SEBS	NE-U17-15	¥1,800 在庫限り
			4975479180415	
	耐熱吸気ホース L(150cm) カフス付	SEBS	NE-U17-17	¥4,500 在庫限り
			4975479180439	
	耐熱吸気ホース S(30cm) カフスなし	SEBS	NE-U17-18	¥1,300 在庫限り
			4975479180477	
	耐熱吸気ホース L(150cm) カフスなし	SEBS	NE-U17-20	¥4,000 在庫限り
			4975479180491	

※1 吸気ホースとマスクは含まれません。

ネブライザ〈オムロン 超音波式ネブライザ NE-U07 別売品〉

NE-U07

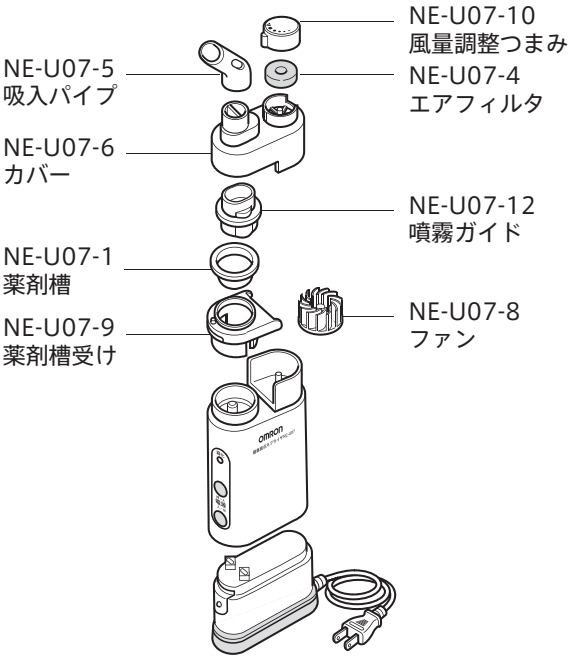※本体の販売は終了しています。



2024 年 9 月末日受付を持ちまして
保守サービスは終了しました。


写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	薬剤槽 【5個入り】	PP	NE-U07-1	¥1,000
			4975479171420	在庫限り
	エアフィルタ 【5個入り】	PUF	NE-U07-4	¥500
			4975479171451	在庫限り
	エアフィルタ	PUF	NE-U07-4P	¥150
			4975479582073	在庫限り
	ノズルキャップ	シリコン	NE-U06-4P	¥100
			4975479581953	在庫限り
	吸気ホースS (30cm) カフス付き	EVA カフス: PVC	NE-U10-4	¥1,500
			4975479170539	在庫限り
	ファン	PPO	NE-U07-8	¥400
			4975479582097	在庫限り
	薬剤槽受け	PPO	NE-U07-9	¥500
			4975479582103	在庫限り
	風量調整つまみ	PPO	NE-U07-10	¥200
			4975479582035	在庫限り
	噴霧ガイド	PC	NE-U07-12	¥200
			4975479582042	在庫限り

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	吸入マスク (大)	SEBS ひも:ゴム	NE-U10-1P	¥1,200
			4975479582127	
	吸入マスク (大) 【3個入り】	SEBS ひも:ゴム	NE-U10-1	¥3,000
			4975479170492	
	吸入マスク (小)	SEBS ひも:ゴム	NE-U10-2P	¥1,200
			4975479582226	
	吸入マスク (小) 【3個入り】	SEBS ひも:ゴム	NE-U10-2	¥3,000
			4975479170508	
	ノーズピース (ソフトタイプ) 【20個入り】	PVC	NE-C10-10	¥3,500
			4975479170874	
	ノーズピース (ソフトタイプ) 【5個入り】	PVC	NE-C10-10P	¥1,000
			4975479581618	
	電源アダプタ	ポリル 樹脂+ PVC	NE-U07-13	¥5,000
			4975479582059	在庫限り

ネブライザ〈オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C30 別売品〉

NE-C30

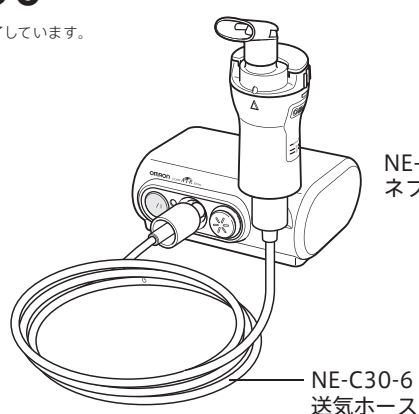※本体の販売は終了しています。



2022年6月末日受付を持ちまして
保守サービスは終了しました。


写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	ネブライザキット ①+②+③+④	PP (耐熱)	NE-C28-1	¥1,200
			4975479185601	
	キャップ ①	PP (耐熱)	NE-C28-1P4	¥300
			4975479185649	
	外気導入管 ②	PP (耐熱)	NE-C28-1P3	¥500
			4975479185632	
	吸水管／ バブル ③ 【2個入り】	PP (耐熱)	NE-C28-1P2	¥500
			4975479185625	
	薬液ボトル ④	PP (耐熱)	NE-C28-1P	¥400
			4975479185618	
	マウスピース	PP (耐熱)	NE-C28-3P	¥200
			4975479185670	
	マウスピース 【5個入り】	PP (耐熱)	NE-C28-3	¥800
			4975479185663	
	ノーズピース (ソフトタイプ) 【5個入り】	PVC	NE-C10-10P	¥1,000
			4975479581618	
	ノーズピース (ソフトタイプ) 【20個入り】	PVC	NE-C10-10	¥3,500
			4975479170874	
	吸入マスク (大)	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-1P	¥1,200
			4975479582127	
	吸入マスク (大) 【3個入り】	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-1	¥3,000
			4975479170492	
	吸入マスク (小)	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-2P	¥1,200
			4975479582226	
	吸入マスク (小) 【3個入り】	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-2	¥3,000
			4975479170508	

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	吸入マスク (小)用 アダプタ	PP (耐熱)	NE-C28-4	¥600
			4975479185687	
	エアフィルタ セット 【5個入り】	ポリエ ステル	NE-C30-4	¥300
			4975479185786	
	エアフィルタ カバー	ABS	NE-C30-5	¥200 在庫限り
			4975479185793	
	本体ゴム足 【4個入り】	シリコン	NE-C30-RFT	¥200 在庫限り
			4975479190360	
	キャリング バッグ		NE-C30-SOCA	¥2,000 在庫限り
			4975479185809	
	専用AC アダプタ		NE-C30-2	¥2,500 在庫限り
			4975479185779	
	専用バッテリー パック		NE-C30-1P	¥6,000 在庫限り
			4975479185755	
	ネブライザキット キッズアクセサリ クマ		NE-KD1	¥500
			4975479191343	
	ネブライザキット キッズアクセサリ ウサギ		NE-KD2	¥500
			4975479191350	
	ネブライザキット キッズアクセサリ ゾウ		NE-KD3	¥500
			4975479191367	


ネブライザ〈オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U22 別売品〉

NE-U22

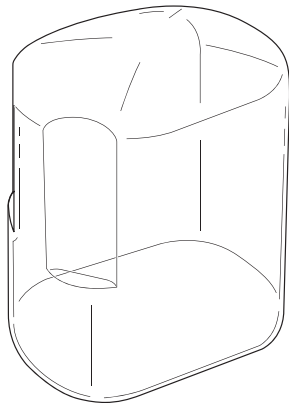
※本体の販売は終了しています。




NE-U22-9
本体カバー

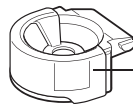

NE-U22-4
メッシュキャップ

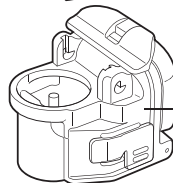

NE-U22-3
薬液ボトル

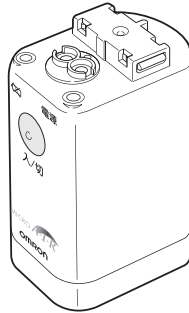

2024年5月末日受付を持ちまして
保守サービスは終了しました。

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	マウスピース (U22)	SEBS	NE-U22-1	¥200
			4975479179891	
	マスクアダプタ (U22)	PC	NE-U22-2	¥500 在庫限り
			4975479179907	
	薬液ボトル (U22)	PSF/ チタン/ シリコン	NE-U22-3	¥2,600 在庫限り
			4975479179914	
	メッシュキャップ (U22)	PSF/ シリコン /PC /金属合金	NE-U22-4	¥3,500 在庫限り
			4975479179921	
	メッシュキャップ カバー (U22)	PP	NE-U22-4P	¥100 在庫限り
			4975479180590	
	ACアダプタ (U22)	PC	NE-U22-5	¥2,000 在庫限り
			4975479179938	
	バッテリーカバー (U22)	PC/シリコン/ ステン レス	NE-U22-8	¥1,000 在庫限り
			4975479179969	
	本体カバー (U22)	PC	NE-U22-9	¥300 在庫限り
			4975479179976	
	吸入マスク (大)	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-1P	¥1,200
			4975479582127	
	吸入マスク (大) 【3個入り】	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-1	¥3,000
			4975479170492	

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	吸入マスク (小)	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-2P	¥1,200
			4975479582226	
	吸入マスク (小) 【3個入り】	SEBS ひも: ゴム	NE-U10-2	¥3,000
			4975479170508	

吸入器

好きな場所や姿勢で利用できるコンパクトなハンディ吸入器

オムロン ハンディ吸入器 NE-S20

オープン価格

本体質量：約110g(電池含まず)
 外形寸法：幅45×高さ125×奥行き70mm
 医療機器認証番号：303AHBZX00008000
 一般名称：家庭用超音波吸入器
 管理医療機器

メッシュは1回使い切りだから衛生的。取付も簡単！



吸入器〈オムロン ハンディ吸入器 NE-S20 別売品〉

写真	部品名	材質	型番	価格 (税別)
			JANコード	
	オムロンハンディ吸入器用ディスボメッシュ【10個入り】		NES-WTDMC-20	¥800
			4975479199394	
	給水ボトル	PC/ シリコン	NES-WTBTL-20	¥2,600
			4975479199400	
	専用ACアダプタ		NEB-AC-20	¥2,000
			4975479199080	

体重体組成計〈両足測定タイプ〉

自動でアプリ連携 乗るだけ、約4秒で測定完了

オムロン体重体組成計 KRD-608T2 カラダスキャン
KRD-608T2-W(ホワイト) / BK(ブラック)

オープン価格

本体質量：約1.7kg(電池含む)

外形寸法：幅約327×厚さ約30×奥行き約249mm



BK(ブラック)

W(ホワイト)

かんたん測定機能

ステップON	自動認識	体重引き算機能
体重	体脂肪率	基礎代謝／BMI
骨格筋率	内臓脂肪レベル	体年齢
6才から測定OK	前回値メモリ※1	単4電池×4(約6カ月)
Bluetooth®通信対応		

※1 本体記録メモリ最大30回分(4人合計120回)はスマートフォンアプリでのみ表示

◎植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。

◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

項目別に測定結果を表示 毎日の体重管理の改善ポイントをチェック

オムロン体重体組成計 HBF-236 カラダスキャン
HBF-236JBW(ブラウン) / JW(ホワイト)
JDB(ダークブルー)

オープン価格

本体質量：約1.6kg(電池含む)

外形寸法：幅約285×奥行き約280×厚さ約28mm



JBW(ブラウン)

JW(ホワイト)

JDB(ダークブルー)

かんたん測定機能

ステップON	自動認識
体重	体脂肪率
骨格筋率	内臓脂肪レベル
6才から測定OK	前回値メモリ
単4電池×4(約6カ月)	

乗るだけで始める体重測定を 習慣化しやすいベーシックモデル

オムロン体重体組成計 HBF-235 カラダスキャン
HBF-235-JB(ブルー) / JPK(ピンク) / JW(ホワイト)

オープン価格

本体質量：約1.3kg(電池含む)

外形寸法：幅約285×奥行き約210×厚さ約28mm



JW(ホワイト)

JPK(ピンク)

JB(ブルー)

かんたん測定機能

ステップON	自動認識
体重	体脂肪率
内臓脂肪レベル	6才から測定OK
単4電池×4(約6カ月)	前回値メモリ
BMI	

乗るだけですぐに測定開始 データ通信でカンタン管理

オムロン 体重体組成計 HBF-228T カラダスキャン
HBF-228T-SW (シャイニーホワイト)

オープン価格

本体質量：約1.6kg(電池含む)

外形寸法：幅約285×高さ約28×奥行き約280mm



かんたん測定機能

ステップON	自動認識
体重:100g単位	体脂肪率
骨格筋率	内臓脂肪レベル
6才から測定OK	単4電池×4(約6ヶ月)
Bluetooth®通信対応	
基礎代謝／BMI	
体年齢	

◎植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。

◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

体重体組成計〈両足測定タイプ〉

上質なデザインにこだわる

オムロン 体重体組成計 HBF-226 カラダスキャン
HBF-226-R(レッド)／G(グリーン)／DB(ダークブルー)
オープン価格

在庫限り

本体質量：約1.6kg(電池含む)
外形寸法：幅約285×奥行き約280×厚さ約28mm



R(レッド)

G(グリーン)

DB(ダークブルー)

かんたん測定機能

ステップON

自動認識

体重

体脂肪率

基礎代謝／BMI

骨格筋率

内臓脂肪レベル

体年齢

6才から測定OK

前回値メモリ

単4電池×4(約6カ月)

ダイエットもスタイルもあなたらしく

オムロン 体重体組成計 HBF-225 カラダスキャン
HBF-225-Y(イエロー)
オープン価格

在庫限り

本体質量：約1.3kg(電池含む)
外形寸法：幅約285×奥行き約210×厚さ約28mm



かんたん測定機能

ステップON

自動認識

体重

体脂肪率

BMI

内臓脂肪レベル

6才から測定OK

前回値メモリ

単4電池×4(約6カ月)

使い勝手も収納もスマート

オムロン 体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン
HBF-214-W(ホホワイト)／PK(ピンク)／B(ブルー)
BW(ブラウン)
オープン価格

本体質量：約1.6kg(電池含む)
外形寸法：幅約285×高さ約28×奥行き約280mm



PK(ピンク)

B(ブルー)

BW(ブラウン)

W(ホホワイト)

体重

体脂肪率

基礎代謝／BMI

骨格筋率

内臓脂肪レベル

体年齢

前回値メモリ

単4電池×4(約1年)

コンパクトで収納しやすいA4サイズ

オムロン 体重体組成計 HBF-212 カラダスキャン
HBF-212(ホホワイト)
オープン価格

本体質量：約1.3kg(電池含む)
外形寸法：幅約285×高さ約28×奥行き約210mm



体重

体脂肪率

BMI

内臓脂肪レベル

単4電池×4(約1年)

体重体組成計〈両手両足測定タイプ〉

部位別測定で細かくチェック データ通信で簡単に管理

オムロン 体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン
HBF-702T

オープン価格

本体質量：約2.2kg(電池含む)
外形寸法：幅約300×高さ約51
×奥行き約325mm

NEW



かんたん測定機能

ステップON

自動認識

部位別：皮下脂肪率

体重／体脂肪率

基礎代謝／BMI

部位別：骨格筋率

内臓脂肪レベル

体年齢

コードリール収納

1人30回メモリ(内蔵)

単3電池×4(約1年)

Bluetooth®通信対応

◎ 植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎ 「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

体重計

測定結果を見やすい大型表示

体重計 HN-300T2

HN-300T2-JW(ホワイト) /JBK(ブラック)

オープン価格

本体質量：約1.5kg(電池含む)

外形寸法：幅約270×高さ約26.9×奥行き約290mm



JW(ホワイト)



JBK(ブラック)

体重

30回メモリ(内蔵)

フィルタリング機能

ペアリング2台可能

単4電池×4

Bluetooth®通信対応

◎ 植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎ 「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

体重体組成計のおすすめ機能

ステップON

乗るだけで電源ON。

乗ると
電源ON

乗るだけ測定(自動認識機能)

乗るだけで自動的に
ユーザーを識別するから、
面倒な操作なしで測定が簡単。



高速測定

乗って約4秒で
測定完了。

約4秒

測定完了

前回値表示

毎日の変化を確認できる。



前回値

表示指標のカスタマイズ

スマートフォン(iPhone・Android)
からの設定で、自分の気になる
指標だけを本体表示できる。



子どもアルゴリズム

6才から体脂肪率が測定でき、
お子さまの肥満予防にも役立つ。

体重体組成計比較表

体重体組成計				
商品型式名	KRD-608T2	HBF-236	HBF-235	HBF-228T
測定タイプ	両足測定タイプ			
メーカー希望小売価格(税別)	オープン価格			
OMRON connect 対応	●	—	—	●
対応スマートフォン	iPhone・Android (Bluetooth®) 対応※1	—	—	iPhone・Android (Bluetooth®) 対応※1
皮下脂肪率(0.1%単位)	—	—	—	—
内臓脂肪レベル(1レベル単位)	1~30			
内臓脂肪レベル判定	9段階	3段階		
体脂肪率(0.1%単位)	●	●	●	●
体脂肪率判定	12段階	4段階		
骨格筋率(0.1%単位)	●	●	—	●
骨格筋率判定	12段階	4段階	—	4段階
BMI(0.1単位)	●	●	●	●
基礎代謝(1kcal単位)	●	●	—	●
体年齢(1才単位)	●	●	—	●
体重	2~100kg まで :50g単位 100~135 kg まで:100g単位	2~100kg まで :100g 単位 100~135 kg まで :200g 単位		100g単位
ステップON	●	●	●	●
自動認識機能	●	●	●	●
子どもアルゴリズム	●	●	●	●
体重引き算機能	●	—	—	—
前回値表示	●	●	●	—
本体記録メモリ	最大30回分※2	—	—	—
登録人数	4人分			
JANコード	[ホワイト]4975479419072 [ブラック]4975479419089	[ブラウン]4975479419027 [ダークブルー]4975479419010 [ホワイト]4975479419003	[ブルー]4975479419041 [ピンク]4975479419058 [ホワイト]4975479419034	4975479414954

※1 対応スマートフォンについては、55ページをご参照ください。

※2 4人の合計120回分をスマートフォンのみで表示

体重体組成計比較表

体重体組成計	 在庫限り	 在庫限り		
商品型式名	HBF-226	HBF-225	HBF-214	HBF-212
測定タイプ	両足測定タイプ			
メーカー希望小売価格(税別)	オープン価格			
OMRON connect 対応	—	—	—	—
対応スマートフォン	—	—	—	—
皮下脂肪率(0.1%単位)	—	—	—	—
内臓脂肪レベル(1レベル単位)	1~30			
内臓脂肪レベル判定	3段階			
体脂肪率(0.1%単位)	●	●	●	●
体脂肪率判定	4段階			
骨格筋率(0.1%単位)	●	—	●	—
骨格筋率判定	4段階	—	4段階	—
BMI(0.1単位)	●	●	●	●
基礎代謝(1kcal単位)	●	—	●	—
体年齢(1才単位)	●	—	●	—
体重	100g単位		2~100kg まで :100g 単位 100~135 kg まで :200g 単位	
ステップON	●	●	—	—
自動認識機能	●	●	—	—
子どもアルゴリズム	●	●	—	—
体重引き算機能	—	—	—	—
前回値表示	●	●	●	—
本体記録メモリ	—	—	—	—
登録人数	4人分			
JANコード	[レッド]4975479414923 [グリーン]4975479414930 [ダークブルー]4975479414947	[ピンク]4975479414909 [イエロー]4975479414893	[ピンク]4975479407789 [ブルー]4975479407765 [ブラウン]4975479407772 [ホワイト]4975479407796	4975479407802

体重体組成計/体重計	 connect omron NEW	 connect omron
商品型式名	HBF-702T	HN-300T2
測定タイプ	両手両足測定タイプ	体重計
メーカー希望小売価格(税別)	オープン価格	
部位別判定※1(全身・体幹・両脚・両腕)	●	—
OMRON connect 対応	●	●
対応スマートフォン	iPhone・Android(Bluetooth®)対応※2	
皮下脂肪率(0.1%単位)	部位別	—
内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)	0.5~30	—
内臓脂肪レベル判定	3段階	—
体脂肪率(0.1%単位)	●	—
体脂肪率判定	4段階	—
骨格筋率(0.1%単位)	部位別	—
骨格筋率判定	部位別4段階	—
BMI(0.1単位)	●	—
基礎代謝(1kcal単位)	●	—
体年齢(1才単位)	●	—
体重	3~100kg まで :100g単位 100~135 kgまで:200g単位	5~100kg まで :100g単位 100~135 kgまで:200g単位
同年齢比較	部位別5段階	—
カラダチャート	—	—
ステップON	●	●
自動認識機能	●	—
子どもアルゴリズム	—	—
体重引き算機能	—	—
前回値表示	—	—
本体記録メモリ	1人30回分 (4人合計120回分)	30回分 「OMRON connect」アプリでのみ表示
登録人数	4人分	—
JANコード	4975479414985	[ホワイト]4975479418976 [ブラック]4975479418969



危険

●下記の医療機器との併用はしないでください。

- (1)ペースメーカーなどの植込み型医療機器
 - (2)人工心臓などの植込み型機器
 - (3)心電計などの装着型医療機器
- ◎誤動作により、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

※1 部位別皮下脂肪率のうち「両脚」および「両腕」は従来機種の部位別「脚」および「腕」の体脂肪率と同じものを算出しています。また、部位別骨格筋率は従来機種の部位別筋肉率と同じものを算出しています。

※2 対応スマートフォンについては、55ページをご参照ください。



測定単位や対象年齢など、仕様の詳細はオムロンヘルスケアのホームページより参照ください。

活動量計〈研究用〉

オムロンの独自のアルゴリズムで 歩行と生活活動を識別し METs を算出

オムロン 活動量計 Active style Pro

HJA-750C

メーカー希望小売価格 **¥20,000(税別)**

本体質量：約23g(電池含む)

外形寸法：縦52×横40×厚さ12mm

JANコード：4975479409509

・10秒毎にMETsを記録(歩数は1時間毎)

・専用ソフトの利用で、無線通信(NFC)やサーバ連携ができ、研究データの一元管理が可能になります。

*この商品は専用ソフトを利用することで、本体の設定と記録データをパソコンに転送することが可能になります。パソコンでの通信には、専用USB通信トレイHHX-IT4(別売)が必要です。

*専用ソフトやPCの推奨環境については、担当営業までお問い合わせください。

活動時間※1	時計	45日間メモリ
エクササイズ量※1	METs(活動強度)	消費カロリー※1
週間エクササイズ量※1	電池DC3V(リチウム電池CR2032×1)※2	

※1 表示には別途専用ソフトが必要です。 ※2 電池は付属していません。



USB通信トレイ HHX-IT4

別売品

通信方式：NFC-F(ISO/IEC 18092 準拠)、RFID(ISO/IEC 15693 準拠)

電源電圧：DC5V(USBより供給)

本体質量：約65g(USBケーブル含む)

外形寸法：直径約95.0×高さ約13.0mm

オープン価格



△**特にご注意ください**／USB通信トレイは電波を使用したRFID機器のリーダー・ライターです。植込型医用電気機器を装着されている方は、装着部位をUSB通信トレイの通信エリアより22cm以内に近づけないでください。 ※使用する用途・場所によっては医用電気機器に影響を与える恐れがあります。

活動量計 Calori Scan シリーズ

早歩きで効率よくカロリー消費、 毎日の頑張った成果はスマートフォンで簡単記録・管理

オムロン 活動量計 カロリスキャン

HJA-331T1-JW(ホワイト)／JBK(ブラック)

オープン価格

本体質量：約28g(電池含む)

外形寸法：縦約33×横約78×厚さ約12mm

NEW

ポケットIN	時計	脂肪燃焼量
7日間メモリ※1	早歩き歩数	総消費カロリー
目標活動時間	目標達成インジケータ	距離
電池CR2032×1(約3カ月)		

※1 本体メモリは14日間

◎植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。

◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。



JW(ホワイト)



JBK(ブラック)



connect
OMRON

「早歩き歩数」を個別にカウントし、 早歩き目標時間を表示

オムロン 活動量計 カロリスキャン

HJA-330-JW(ホワイト)／JDB(ダークブルー)

オープン価格

本体質量：約28g(電池含む)

外形寸法：縦約33×横約78×
厚さ約12mm



JW(ホワイト)



JDB(ダークブルー)

ポケットIN	時計	脂肪燃焼量
7日間メモリ	早歩き歩数	総消費カロリー
目標活動時間	目標達成インジケータ	距離
電池CR2032×1(約3カ月)		

毎日の目標活動カロリーの達成度を わかりやすく表示

オムロン 活動量計 カロリスキャン

HJA-404-R(レッド)／DB(ダークブルー)／W(ホワイト)

オープン価格

本体質量：約27g(電池含む)

外形寸法：縦約33×横約78×
厚さ約12mm



R(レッド)



DB(ダークブルー)



W(ホワイト)

ポケットIN	時計	階段上り歩数(10歩単位)
脂肪燃焼量	7日間メモリ	早歩き歩数
総消費カロリー	目標活動時間	目標達成インジケータ
距離	電池CR2032×1(約3カ月)	

活動量計 Calori Scan シリーズ

毎日のダイエット努力を、2種類のマークでお知らせ 毎日持ち歩きたくなる活動量計

オムロン 活動量計 カロリスキャン

HJA-310-PK(ピーチ) /HJA-310-W(ヴァニラ)

オープン価格

本体質量：約21g(電池含む)

外形寸法：幅約30×高さ約59×奥行き約13mm

ポケットIN	ごほうびカロリー	時計
脂肪燃焼量	7日間メモリ	総消費カロリー
目標活動時間	電池CR2032×1(約6カ月)	



活動量計比較表

活動量計		Calori Scan			
		connect omron  NEW		 在庫限り	
		HJA-331T1	HJA-330	HJA-404	HJA-310
商品型式名					
メーカー希望小売価格(税別)		オープン価格			
OMRON connect 対応		●	—	—	—
対応スマートフォン		iPhone・Android (Bluetooth®) 対応 ※1	—	—	—
表示	歩数	●	●	●	●
	階段上り歩数	—	—	●	—
	早歩き歩数	●	●	●	—
	脂肪燃焼量	●	●	●	●
	距離	●	●	●	—
	総消費カロリー	●	●	●	●
	活動カロリー	●	●	●	—
	時計	●	●	●	●
表示メモリ		7日間 (本体メモリは14日間)	7日間		
ポケット＆バッグIN		ポケットIN			
付属品		落下防止付用クリップ付きストラップ			
その他の特長		目標達成インジケータ 目標活動時間			ごほうびカロリー 目標活動時間 目標総消費カロリー
電氣的定格		電池CR2032×1個			
JANコード		[ホワイト]4975479416200 [ブラック]4975479416194	[ホワイト]4975479416170 [ダークブルー]4975479416187	[レッド]4975479416088 [ダークブルー]4975479416095 [ホワイト]4975479416071	[ピーチ]4975479409127 [ヴァニラ]4975479409134

※1 対応スマートフォンの確認については、55ページをご参照ください。

歩数計

1ボタン1表示のかんたん操作

オムロン 歩数計
HJ-325-W (ホワイト) / PK (ピンク) / B (ブルー)
オープン価格

本体質量：約23g(電池含む)
外形寸法：縦約57×横約42×厚さ約13mm



W(ホワイト) PK(ピンク) B(ブルー)

- ポケット&バッグIN
- 時計
- マイベスト3※1
- 7日間メモリ
- 電池CR2032×1(約6カ月)

※1 過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることが可能。1万歩以上の歩数が対象。

ポケットインタイプのシンプル機能歩数計

オムロン 歩数計
HJ-320-W(ホワイト)/BK(ブラック)
オープン価格

本体質量：約20g(電池含む)
外形寸法：縦約31×横約75×厚さ約8mm



W(ホワイト)



BK(ブラック)

- ポケット&バッグIN
- 時計
- 電池CR2032×1(約6カ月)

歩数計比較表

歩数計			
商品型式名		HJ-325	HJ-320
メーカー希望小売価格(税別)		オープン価格	
表示	歩数	●	●
	マイベスト3	●※1	—
	歩行距離	—	●
	消費カロリー	—	—
	時計	●	●
表示メモリ		7日間	—
ポケット&バッグIN		●	●
付属品		落下防止付用クリップ付きストラップ	—
電氣的定格		電池CR2032×1個	
JANコード		[ホワイト]4975479409349 [ピンク]4975479409370 [ブルー]4975479409363	[ホワイト]4975479416156 [ブラック]4975479416163

※1 過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることが可能。1万歩以上の歩数が対象。

安全に関するご注意

減量や運動療法などをおこなう場合は、自分だけで判断せず、医師や専門家の指導を受けてください。
◎自己判断は、健康を害する原因になります。

音波式電動歯ブラシ（充電式）

独自ヘッドが虫歯や歯周病の原因となる奥歯や内側の歯垢を確実に取り除く

オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B322-SL オープン価格

質量：本体 約64g(ブラシ含む)、充電器 約115g、携帯ケース 約55g
寸法：本体 全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器 幅約51×高さ約35.5×奥行き約63mm
ブラシスタンド 幅約96×高さ約27×奥行き約30mm
携帯ケース 幅約50×高さ約209×奥行き約32mm

セット内容:

歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142)、歯垢除去ブラシ(SB-172)

歯周ケアブラシ(SB-182)、すき間みがきブラシ(SB-192)

充電器、ブラシスタンド、携帯ケース



●ブラッシングモード

クリーンモード

ポイントケアモード

ソフトケアモード

充電時期をお知らせ

歯みがき時間ナビタイマー

オートパワーオフ

充電器(付属)

ブラシスタンド(付属)

充電式 AC100-110V

ケアの目的に合わせて選べる、4種類のブラシヘッド(付属)

オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B304-W オープン価格

質量：本体 約46g(ブラシ含む)、充電器 約115g
寸法：本体 全長約195(ブラシ含む) mm×幅約18.8mm×奥行き約18.8mm
充電器 幅約51×高さ約35.5×奥行き約63mm
ブラシスタンド 幅約96×高さ約27×奥行き約30mm

セット内容:

幅広プレミアムブラシ(SB-122)、歯垢除去ブラシ(SB-172) 歯

周ケアブラシ(SB-182)、すき間みがきブラシ(SB-192)

充電器、ブラシスタンド



●ブラッシングモード

クリーンモード

歯みがき時間ナビタイマー

オートパワーオフ

充電器(付属)

ブラシスタンド(付属)

充電式 AC100-110V

ステイン除去も歯ぐきケアもしっかり

オムロン 音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B319-GD オープン価格

質量：本体 約64g(ブラシ含む)、充電器 約160g
寸法：本体 全長約230mm(ブラシ含む)、
約21mm×奥行き約21mm
充電器 幅約52×高さ約36×奥行き約82mm

セット内容:

歯垢除去ブラシ(SB-172)、歯周ケアブラシ(SB-182)

ステイン除去ブラシ(SB-132)、充電器、ブラシスタンド



●ブラッシングモード

クリーンモード

歯ぐきケアモード

充電時期をお知らせ

歯みがき時間ナビタイマー

オートパワーオフ

充電器(付属)

ブラシスタンド(付属)

充電式 AC100-110V

独自ヘッドが虫歯や歯周病の原因となる奥歯や内側の歯垢を確実に取り除く

オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B320-W オープン価格

質量：本体 約64g(ブラシ含む)、充電器 約115g
寸法：本体 全長約230mm(ブラシ含む)、最大径約24mm
充電器 幅約51×高さ約35.5×奥行き約63mm
ブラシスタンド 幅約96×高さ約27×奥行き約30mm

セット内容:

歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142)

歯垢除去ブラシ(SB-172)、充電器、ブラシスタンド



●ブラッシングモード

クリーンモード

ポイントケアモード

ソフトケアモード

充電時期をお知らせ

歯みがき時間ナビタイマー

オートパワーオフ

充電器(付属)

ブラシスタンド(付属)

充電式 AC100-110V

独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの約5倍

オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B303-W(ホワイト) /PK(ピンク) オープン価格

質量：本体 約46g(ブラシ含む)、充電器 約115g
寸法：本体 全長約195(ブラシ含む) mm×幅約18.8mm
×奥行き約18.8mm
充電器:幅約 51 mm× 高さ約 35.5mm × 奥行き約 63 mm
ブラシスタンド:幅約 96 mm× 高さ約 27 mm× 奥行き約 30 m

セット内容:

歯垢除去ブラシ(SB-172)

ブラシスタンド、充電器



PK(ピンク) W(ホワイト)

●ブラッシングモード

クリーンモード

歯みがき時間ナビタイマー

オートパワーオフ

充電器(付属)

ブラシスタンド(付属)

充電式 AC100-110V

電動歯ブラシのベーシックモデル 手みがきがないツルツル感

オムロン 音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B317-W オープン価格

質量：本体 約46g(ブラシ含む)、充電器 約115g
寸法：本体 全長約195(ブラシ含む)×幅約18.8
×奥行き約18.8mm
充電器 幅約51×高さ約35.5×奥行き約63mm
ブラシスタンド 幅約96×高さ約27×奥行き約30mm

セット内容:

歯垢除去ブラシ(SB-172)

充電器、ブラシスタンド



●ブラッシングモード

クリーンモード

歯みがき時間ナビタイマー

オートパワーオフ

充電器(付属)

ブラシスタンド(付属)

充電式 AC100-110V

音波式電動歯ブラシ (乾電池式)

乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動

オムロン 音波式電動歯ブラシ
HT-B214-G(グリーン) /PK(ピンク)
オープン価格

質量：本体 約60g(ブラシ、乾電池含む)
寸法：本体 全長約200mm(ブラシ含む) × 幅約21.8mm
× 奥行き約21.8mm

付属ブラシ：歯垢除去ブラシ(SB-172)



G(グリーン) PK(ピンク)

●ブラッシングモード
クリーンモード

オートパワーオフ

単4乾電池×2(約2.5カ月)

スリムデザインでも、乾電池式で約18,000回/分の高速音波振動を実現

オムロン 音波式電動歯ブラシ
HT-B220-W
オープン価格

質量：本体 約60g(ブラシ、乾電池含む)
寸法：本体 全長約194.5mm(ブラシ含む) × 幅約15.6mm
× 奥行き約15.9mm

付属ブラシ：歯垢除去ブラシ(SB-172)



●ブラッシングモード
クリーンモード

単4乾電池×1(約2.5カ月)

スリムデザインでも、乾電池式で約18,000回/分の高速音波振動を実現

オムロン 音波式電動歯ブラシ
HT-B221-W
オープン価格

在庫限り

質量：本体 約60g(ブラシ、乾電池含む)
寸法：本体 全長約194.5mm(ブラシ含む) × 幅約15.6mm
× 奥行き約15.9mm

付属ブラシ：歯周ケアブラシ(SB-182)



●ブラッシングモード
クリーンモード

単4乾電池×1(約2.5カ月)

極細軽量のスリム本体で、手みがきの約3倍の歯垢除去力

オムロン 音波式電動歯ブラシ
HT-B222-W
オープン価格

質量：本体 約60g(ブラシ、乾電池含む)
寸法：本体 全長約194.5mm(ブラシ含む) × 幅約15.6mm
× 奥行き約15.9mm

付属ブラシ：幅広プレミアムブラシ(SB-122)



●ブラッシングモード
クリーンモード

単4乾電池×1(約2.5カ月)

音波式電動歯ブラシ比較表

音波式 電動歯ブラシ (充電式)					  			
商品型式名		H T-B322	H T-B320	H T-B304	H T-B303	H T-B319	H T-B317	
メーカー希望小売価格(税別)		オープン価格						
マ ニ ュ ア ル	クリーン	●	●	●	●	●	●	
	歯ぐきケア	—	—	—	—	●	—	
	ポイントケア	●	●	—	—	—	—	
	ソフトケア	●	—	—	—	—	—	
歯みがき時間ナビタイマー		30秒ごとにお知らせ						
充電時期をお知らせ		●	●	●	●	●	●	
付 属 品	付 属 ブ ラ シ	歯垢除去コンパクト	●	●	—	—	—	
		歯垢除去	●	●	●	●	●	●
		歯周ケア	●	—	●	—	●	—
		すき間みがき	●	—	●	—	—	—
		ステイン除去	—	—	—	—	●	—
		幅広プレミアム	—	—	●	—	—	—
	その他	充電器・ブラシスタンド 携帯ケース	充電器・ブラシスタンド					
電氣的定格		AC100—110V、50/60Hz						
JANコード		4975479416880	497547941903	4975479417467	[ホワイト]4975479417474 [ピンク]4975479417481	4975479416934	4975479417450	

音波式 電動歯ブラシ (乾電池式)					
商品型式名		H T-B214	H T-B220	H T-B221	H T-B222
メーカー希望小売価格(税別)		オープン価格			
マ ニ ュ ア ル	クリーン	●	●	●	●
	歯ぐきケア	—	—	—	—
	ポイントケア	—	—	—	—
	ソフトケア	—	—	—	—
歯みがき時間ナビタイマー		—	—	—	—
充電時期をお知らせ		—	—	—	—
付 属 品	付 属 ブ ラ シ	歯垢除去コンパクト	—	—	—
		歯垢除去	●	—	—
		歯周ケア	—	●	—
		すき間みがき	—	—	—
		ステイン除去	—	—	—
		幅広プレミアム	—	—	●
	その他	—	—	—	—
電氣的定格		単4乾電池×2	単4乾電池×1		
JANコード		[グリーン]4975479416842 [ピンク]4975479416835	4975479416811	4975479416828	4975479416859

低周波治療器

本格的な治療内容が充実

オムロン 低周波治療器
HV-F230-JE3
オープン価格

本体質量：約155g
外形寸法：幅50×高さ210×奥行き27mm
医療機器認証番号：306AHBZX00029000
一般の名称：家庭用低周波治療器
管理医療機器

水洗いOK
ロングライフパッド

NEW



モード一覧

	押し	たたき	もみ
	さすり	じっくり	すっきり

ロングライフパッド:2枚 周波数:約0.7~1200Hz 強さ調節:20段階
 液晶表示 バランス調節 部位別コース:6種類
 単4電池×2(約45回)

気軽に使える はじめての低周波治療器

オムロン 低周波治療器
エレパルス HV-F013-JE
オープン価格

本体質量：約75g(電池含む)
外形寸法：幅70×高さ75×奥行き22mm
医療機器認証番号：306AHBZX00017000
一般の名称：家庭用低周波治療器
管理医療機器

水洗いOK
ロングライフパッド

NEW



モード一覧

	リズムたたき	もみ
--	--------	----

ロングライフパッド:2枚 周波数:約1~108Hz 強さ調節:10段階
 部位別コース:5種類 単4電池×2(約3カ月)

Pulse Massager

お部屋で疲れを気持ちよくもみほぐす

オムロン 低周波治療器
HV-F021-J3W
オープン価格

本体質量：約100g(電池含む)
外形寸法：縦112×横52×厚さ25mm
医療機器認証番号：225AABZX00193000
一般の名称：家庭用低周波治療器
管理医療機器

水洗いOK
ロングライフパッド

NEW



モード一覧

	おす	たたく	もむ
--	----	-----	----

ロングライフパッド:2枚 周波数:約1~238Hz 強さ調節:15段階
 液晶表示 部位別コース:6種類 単4電池×2(約4カ月)

Elepuls^{PRO}シリーズ

人の手に近づいた驚きのもみ感 これが、[6電極] 3D治療

オムロン 低周波治療器
HV-F1200-J
3Dエレパルス プロ
オープン価格

本体質量：約480g
外形寸法：幅194×高さ51×奥行き133mm
医療機器認証番号：218AGBZX00071000
一般の名称：家庭用低周波治療器
管理医療機器

水洗いOK
3D大型パッド



モード一覧

	振動	おし	たたき
	もみ	さすり	
	こり解消	疲労回復	神経痛

3D大型パッド:2枚 周波数:約1~1200Hz 強さ調節:20段階
 液晶表示 操作ナビゲーション 治療コース:3種類
 部位別コース:7種類 単3電池×4(約3カ月)

電気治療器

あたためながら、こりと痛みをトータルケア

オムロン 電気治療器
HV-F5500
オープン価格

水洗いOK
患部集中パッド

本体質量：約1.2kg
外形寸法：幅約195×高さ約234×奥行き約210mm
医療機器認証番号：303AABZX00073A01
一般的名称：家庭用低周波治療器 管理医療機器

痛み治療 こり治療 あたため機能



患部集中パッド：4枚 周波数：約1～1200Hz 強さ調節：30段階
大型のヒーターサポーター付 部位別コース：12種類 もみ方コース：5種類
操作ナビゲーション ACアダプタ(付属) 大型液晶表示
電源 AC 100V

様々なこりと痛みを、トータルケア

オムロン 電気治療器
HV-F5300
オープン価格

水洗いOK
患部集中パッド

本体質量：約1.2kg
外形寸法：幅約195×高さ約234×奥行き約210mm
医療機器認証番号：303AABZX00073000
一般的名称：家庭用低周波治療器 管理医療機器

痛み治療 こり治療



患部集中パッド：4枚 周波数：約1～1200Hz 強さ調節：30段階
部位別コース：12種類 もみ方コース：5種類 操作ナビゲーション
ACアダプタ(付属) 大型液晶表示 電源 AC 100V

治療機器比較表

		低周波治療器				電気治療器	
商品型式名		HV-F230-JE3 NEW	HV-F013-JE NEW	HV-F021-J3W NEW	HV-F1200-J	HV-F5500	HV-F5300
メーカー希望小売価格(税別)		オープン価格					
発振周波数		約0.7～1200Hz	約1～108Hz	約1～238Hz	約1～1200Hz		
パッド		ロングライフパッド			3D大型パッド	患部集中パッド	
パッド枚数		2枚				4枚	
機能	ヒーター	—	—	—	—	●	—
	部位別コース	6種類	5種類	6種類	7種類	12種類	
	もみ方コース	6種類	2種類	3種類	5種類		
	治療コース	—	—	—	3種類	19種類	
	操作ナビゲーション	—	—	—	●	●	
	位置調節	—	—	—	●	—	
	強さ調節	20段階	10段階	15段階	20段階	30段階	
	ポイント＆ワイドモード	●	—	—	—	—	
	バランス調節	●	—	—	—	—	
	液晶表示	●	—	●	●(大型)	●(大型)	
その他の特長		—	—	—	症状別コース×3 3D手もみ治療	症状別治療波形	
電氣的定格		単4形アルカリ乾電池×2個			単3電池×4個	AC100V	
販売名		オムロン 低周波治療器 HV-F230シリーズ	オムロン 低周波治療器 HV-F013 シリーズ	オムロン 低周波治療器 HV-F021	オムロン 低周波治療器 HV-F1200	オムロン 電気治療器 HV-F5500 シリーズ	オムロン 電気治療器 HV-F5300 シリーズ
JANコード		4975479418303	4975479418280	4975479418204	4975479418211	4975479418136	4975479418129

マッサージ

小さくて軽いから、どこでも快適マッサージ

オムロン クッションマッサージャ HM-350-R(レッド)／B(ブルー)／BW(ブラウン) オープン価格

本体質量：約1.7kg(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法：幅約390×高さ約270×奥行き約105mm(本体カバーあり)
医療機器認証番号：231AHBZX00003000
一般的名称：家庭用電気マッサージ器 管理医療機器
JANコード：[R] 4975479408809
[B] 4975479408816
[BW] 4975479408823
販売名：オムロン クッションマッサージャ HM-350シリーズ



BW(ブラウン)



B(ブルー)



R(レッド)

ヒーター

洗濯OK(カバー)

オートパワーオフ

AC100V

疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐす

オムロン ネックマッサージャ HM-150-R(レッド)／BW(ブラウン) オープン価格

本体質量：約1180g(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法：幅約360×高さ約338×奥行き約178mm
医療機器認証番号：231AHBZX00006000
一般的名称：家庭用電気マッサージ器 管理医療機器
JANコード：[R] 4975479408922
[BW] 4975479408915
販売名：オムロン ネックマッサージャ HM-150シリーズ



BW(ブラウン)



R(レッド)

ヒーター

オートパワーオフ

AC100V

安全に関するご注意

- 下記の医療機器との併用はしないでください。
 - (1)ペースメーカーなどの植込み型医療機器
 - (2)人工心肺などの植込み型機器
 - (3)心電計などの装着型医療機器
- ◎誤動作により、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

- 次の人は医師と相談してご使用ください。
- ①医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
 - ②悪性腫瘍(特に皮膚がん)のある人
 - ③心臓、脳神経などに障害のある人
 - ④温度感覚喪失が認められる人
 - ⑤妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - ⑥糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - ⑦安静を必要とする人
 - ⑧体温38℃以上(有熱期)の人
 - 例1)急性炎症症状[倦怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期
 - 例2)衰弱しているとき
 - ⑨脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
 - ⑩皮膚に感染症または創傷のある人
 - ⑪光線照射によって過敏症を誘発する医薬品を服用している人
 - ⑫化粧品、消毒剤などでかぶれたことのある人
 - ⑬使用中に発赤、腫脹などが現れた人
- ◎事故や体調不良の原因になります。

補聴器 イヤメイトシリーズ

音が快適に聞こえやすい

オムロン イヤメイトデジタル AK-15
メーカー希望小売価格 ￥50,000(非課税)

本体質量：約1.8g(電池含む)
外形寸法：幅13.5×高さ24.9×奥行10.3mm
医療機器認証番号：228AABZX00056000
JANコード：4975479414848
販売名：イヤメイトデジタル AK-10シリーズ
一般名称：デジタル式補聴器 管理医療機器
※イヤメイトは小さな話し声が聴き取りにくいなど、
耳の少し遠い方のための聴力を補う機器です。
(中・高度難聴の方には向きません)



- ハウリングキャンセル機能※1
- 大音量クリア機能
- ノイズキャンセル機能
- ノンリニア機能
- 耳あな型
- 耳あか防止フィルター
- 軽度難聴用
- 電池PR41N×1(約160時間)

※1 正しく装着するとハウリングを抑える効果がありますが、ハウリングが完全に無くなるわけではありません。

大きな音もクリアに聞こえる

オムロン イヤメイトデジタル AK-10
メーカー希望小売価格 ￥40,000(非課税)

本体質量：約1.8g(電池含む)
外形寸法：幅13.5×高さ24.9×奥行10.3mm
医療機器認証番号：228AABZX00056000
JANコード：4975479414831
販売名：イヤメイトデジタル AK-10シリーズ
一般名称：デジタル式補聴器 管理医療機器
※イヤメイトは小さな話し声が聴き取りにくいなど、
耳の少し遠い方のための聴力を補う機器です。
(中・高度難聴の方には向きません)



- ハウリングキャンセル機能※1
- 大音量クリア機能
- 耳あな型
- 耳あか防止フィルター
- 軽度難聴用
- 電池PR41N×1(約160時間)

※1 正しく装着するとハウリングを抑える効果がありますが、ハウリングが完全に無くなるわけではありません。

- ハウリングキャンセル機能** 補聴器をつけたまま電話をしても、ピーピー音がしにくい。
- 大音量クリア機能** 大音量の音楽もひずみにくく、きれいな音色で聞こえます。
- ノイズキャンセル機能** エアコンや換気扇などの一定レベルで持続する動作音はノイズと判断し増幅を抑制。
- ノンリニア機能** 聞き取りにくい小さな音は大きく増幅、掃除機やドライヤーなどの大きな音は、増幅を抑制。

パルスオキシメータ

見やすい表示画面で測定結果を確認しやすい

オムロン パルスオキシメータ HPO-300T
オープン価格

本体質量：約60g(電池含む)
外形寸法：幅32×高さ61.5×奥行31.5mm
電源：単4形アルカリ乾電池2個
表示方式：カラー有機EL
医療機器認証番号：303AGBZX00010000
JANコード：4975479698217
一般名称：パルスオキシメータ
管理医療機器

connect
omron

測定結果が90%以上はブルー。呼吸器不全が疑われる
90%を下回った場合はオレンジで表示

暗い部屋でも明るく見やすい



- 酸素飽和度(SpO₂)
- 脈拍数
- データ保存30件
- 180度表示回転
- 収納ケース付
- 単4電池×2(約2000回)※1

※1 30秒/回(オムロンヘルスケア社試験条件による)

◎植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。
◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

携帯型心電計

発作時などの心電図記録による不整脈の確認や治療の経過管理に有用

オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U
メーカー希望小売価格 ￥45,200 (税別)

本体質量：約130g (電池含む)
外形寸法：幅53×高さ83×奥行30mm
医療機器認証番号：305AABZX00067000
JANコード：4975479407048
一般的名称：発作時心臓活動記録装置
管理医療機器 特定保守管理医療機器

1分



特長がよくわかる！
製品紹介動画

NEW



[一覧表示]

判読支援ソフト
JANコード:4975479199493
型番:HCG-SOFT-CL2
¥150,000 (税別)



〈使用イメージ〉



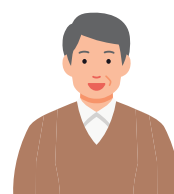
医師



患者さんに HCG-9010U を 1 ～ 2 週間貸出
(本体メモリ最大 100 件)



次の来院時に HCG-9010U を回収し
判読支援ソフトで心電図データを判読



患者さん

本体メモリ最大100件

単4電池×2 (約400回)

判読支援ソフト (別売)

* ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。

いつでもどこでも記録できる医家向け心電計

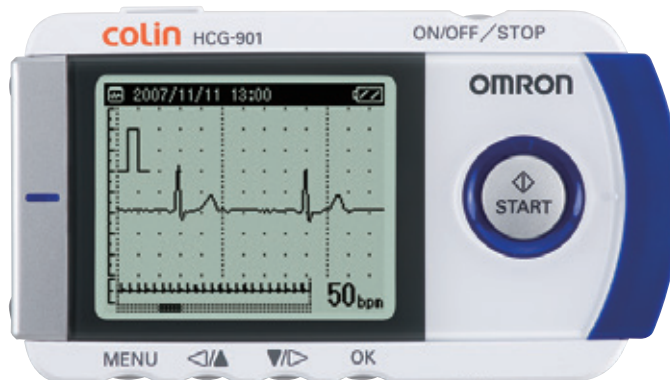
携帯心電計 HCG-901
メーカー希望小売価格 ￥200,000 (税別)

本体質量：約130g (電池含まず)
外形寸法：幅121×高さ67×奥行き24mm
医療機器認証番号：219AGBZX0008900
JANコード：4975479695261
一般的名称：発作時心臓活動記録装置
管理医療機器 特定保守管理医療機器

在庫限り



判読支援ソフト
JANコード:4975479695254
型番:HCG-SOFT-CL1
¥50,000 (税別)



本体内蔵メモリ15回※1

バックライト

単4電池×2 (約400回)

判読支援ソフト (別売)

※1 別売の SD メモリカード使用時は 300 回分の心電図データを保存。
SD メモリカード JAN コード：4946865060222 型番：HCG-SD ¥3,500 (税別)

携帯型心電計

気になったとき胸にあてるだけ、その場で心電図を記録

オムロン 携帯型心電計 HCG-8010T1
メーカー希望小売価格 ￥37,300(税別)

本体質量：約130g(電池含む)
外形寸法：幅53×高さ83×奥行30mm
医療機器認証番号：305AABZX00059000
JANコード：4975479407055
一般的名称：発作時心臓活動記録装置
管理医療機器 特定保守管理医療機器

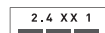


特長がよくわかる！
製品紹介動画



警告

- ・ペースメーカーなど植込み型医療機器を使用している場合は、医師の指導のもとで心電図を記録してください。ペースメーカーの心拍リズムによって、正しく解析できない可能性があります。
- ・ペースメーカーなど植込み型医療機器を使用している場合は、Bluetooth® 通信を OFF にしてから心電図を記録してください。



- ・航空機内や病院など無線通信が禁止された場所では Bluetooth® 通信を OFF にしてください。
- ・記録した心電図波形や解析結果の自己判断・治療は危険です。心電図波形や、それを解析して表示されるメッセージは自分で判断せず、医師にご相談ください。記録した心電図波形や解析結果の自己判断は、病状の悪化につながる可能性があります。



注意

- ・医師など専門家の指導のもとご使用ください。
- ・医師への適切な情報提供のため、記録結果だけでなく、記録時の状況、体調その他自覚症状等を併せて伝えてください。
- ・本製品は日本国内専用です。製品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。Use only in Japan. Product warranty is valid only in Japan.
- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

本体メモリ最大10件

単4電池×2(約400回)

* 心電図記録にはスマートフォンが必要です。

* ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。

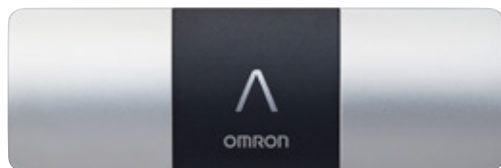
◎植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。

◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

気になった時に、すぐに心電図を記録

オムロン 携帯型心電計 HCG-8060T
オープン価格

本体質量：約24g(電池含む)
外形寸法：約幅30×高さ90×奥行7.4mm
医療機器承認番号：30400BZX00046000
JANコード：4975479407031
一般的名称：発作時心臓活動記録装置
発作時心臓活動記録装置用プログラム
管理医療機器 特定保守管理医療機器



*心電図記録にはスマートフォンが必要です。

*ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。

◎植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。

◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

日々の家庭心電図記録で
心房細動の早期発見・早期治療をサポート

オムロン 心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T
オープン価格

本体質量：本体(カフを除く)：約 550g(電池含まず) カフ：約 130g
外形寸法：本体(カフを除く)：約 幅 232 x 高さ 98 x 奥行き 123mm
カフ：約 幅 145 x 長さ 466mm、チューブ長さ 610mm
医療機器承認番号：30400BZX00028000
JANコード：4975479418846
一般的名称：自動電子血圧計 発作時心臓活動記録装置
発作時心臓活動記録装置用プログラム
販売名：オムロン 心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T シリーズ
管理医療機器 特定保守管理医療機器



特長がよくわかる！
製品紹介動画

1分



*心電図記録にはスマートフォンが必要です。


*ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。

◎植込み型医療機器を装着されている方は55ページ下部の「警告」をご確認ください。

◎「OMRON connect」については55ページをご参照ください。

別売品一覧

商品群	品名 型番	メーカー 希望小売価格 (税別)	対応機種	JANコード	備考
血圧計	オムロンプリンタ HHX-PRINT 在庫限り	¥6,000	HEM-1040	4975479180262	ペーパー 1巻付属 ※対応血圧計は販売終了しています。
	プリンタ用ロール紙 HEM-PAPER-759P	¥500	HEM-1040	4975479180255	5巻入
体温計	プローブカバー-J MC-PROBE-J	¥1,000	MC-581	4975479174278	(40枚入)
電気治療器・低周波治療器	オムロン電気治療器用 患部集中パッド HV-KSPAD	¥2,000	HV-F5300 HV-F5500	4975479405082	(1組 2枚入) 一般医療機器 医療機器届出番号 08B2X10006000025 製造販売元: 積水化成成品工業株式会社
	ロングライフパッド HV-LLPAD	¥2,000	HV-F013 HV-F021 HV-F230	4975479175459	(1組 2枚入) 一般医療機器 医療機器届出番号 08B2X10006000007
	ロングライフパッド (グレー) HV-LLPAD-GY	¥2,000		4975479405167	(1組 2枚入) 一般医療機器 医療機器届出番号 08B2X10006000007
	オムロン低周波治療器用 3D 大型パッド HV-3DPAD	¥2,500	HV-F1200	4975479405044	(1組 2枚入) 一般医療機器 医療機器届出番号 08B2X10006000020
	パッドホルダー HV-KSPAD-EHOLD	¥300	HV-F5300 HV-F5500	4975479187438	
	サポーターカバー HV-F5500-SCOV	¥3,500	HV-F5500	4975479418167	
	パッドヒーター HV-F5200-HEAT	¥5,000	HV-F5500	4975479187407	
	導子コード HV-F5500-CODE	¥700	HV-F5300 HV-F5500	4975479418150	
	導子コード B タイプ HV-CODE-BW (ホワイト)	¥700	HV-F013 HV-F021 HV-F230	4975479193644	
	導子コード 3D タイプ HV-CODE-3D	¥3,500	HV-F1200	4975479186219	
	導子収納具 HV-LLPAD-EHOLD	¥400	HV-F013 HV-F230	4975479175824	
	専用AC アダプタ HV-F5300-AC	¥3,000	HV-F5300	4975479418181	
専用AC アダプタ HV-F5500-AC	¥3,500	HV-F5500	4975479418174		
電動歯ブラシ	歯垢除去ブラシ SB-172	¥700	HT-B220 HT-B221 HT-B222 HT-B214 HT-B303 HT-B304 HT-B317 HT-B319 HT-B320 HT-B322	4975479198762	(2本入)
	歯周ケアブラシ SB-182	¥700		4975479198694	(2本入)
	すき間みがきブラシ SB-192	¥800		4975479198670	(2本入)
	幅広 プレミアムブラシ SB-122	¥900		4975479198755	(2本入)
	ステイン除去ブラシ SB-132	¥800		4975479198731	(2本入)
	歯垢除去コンパクトブラシ SB-142	¥800		4975479198717	(2本入)
マッサージャ	ACアダプタ HM-141-AC2	¥2,750	HM-350	4975479198151	
	交換用カバー(ブラウン) HM-350-COVBW	¥3,000		4975479408885	
	交換用カバー(ブルー) HM-350-COVBL			4975479408861	
	交換用カバー(レッド) HM-350-COVR			4975479408878	
補聴器	電池(PR-41) AK-BATT-PR41N	¥1,600	AK-15 AK-10	4975479198823	(8個入)
	イヤチップS AK-DCP-S	¥900		4975479179426	(2個入)
	イヤチップM AK-DCP-M2			4975479179501	(2個入)
	イヤチップM(ペント付き) AK-DCP-M			4975479179433	(2個入)
	イヤチップL AK-DCP-L2			4975479179518	(2個入)
	イヤチップL(ペント付き) AK-DCP-L			4975479179440	(2個入)
	電池ホルダー AK-10-BAHO	¥1,200		4975479198120	(3個入)

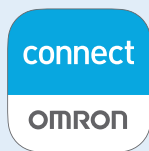


OMRON connect (オムロンコネクト)

スマートフォンに最新の健康データを簡単に転送できる健康管理アプリです。


OMRON connect 便利な基本機能

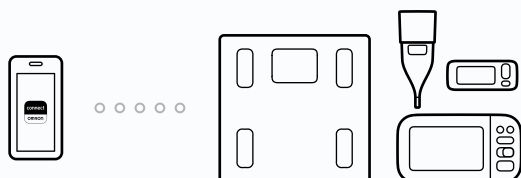簡単につながる



最初にアプリを立ち上げると、機器を接続するためのガイドが表示されるので、スマートフォンと機器を簡単につなぐことができます。血圧計と体重体組成計など、複数機器でも接続は簡単です。

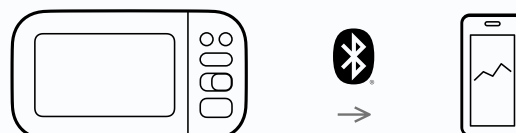
スムーズなデータ転送



測定したデータは、OMRON connectにBluetooth®通信など※でスムーズに転送できます。アプリに手入力する必要がなく、時間のないときもすぐに記録できます。

※ 音波通信体温計は通信方法が異なります。

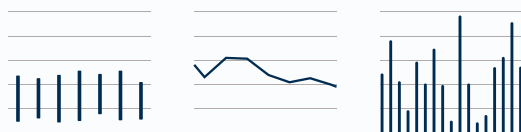グラフでからだの傾向がわかりやすい



過去のバイタルデータをグラフで確認できます。表示グラフの単位を日/週/月/年に自分で切り替え※できるので、日々の変化や長期的な傾向もひと目で確認できます。

※ 切り替えのできない機器もあります。

リマインダー機能で測り忘れを防ぐ



測定時刻や服薬時刻を登録すると、毎日お知らせ（アプリ通知）が届くので、測り忘れや薬の飲み忘れを防ぐことができます。

多様な健康管理アプリケーションとの連携可能

「OMRON connect」に転送したデータは、連携先アプリに自動転送。これにより、測定した健康データを日頃からお使いのアプリで管理できます。



その他の詳しい情報



対応スマートフォンについてはこちら
<https://www.omronconnect.com/devices/>



「OMRON connect」についてさらに詳しい情報はこちら
<https://www.omronconnect.com/>

App Store、Google Playで検索してダウンロード

App Store、Google Playにて オムロンコネクト で検索



※ アプリを利用するには対応機器登録が必要です。 ※ かんたん血圧日記を利用するにはOMRON connectクラウドの登録が必要です。

※ お断りなく機器やサービスの仕様を変更することがありますので、ご了承ください。 ※ 対応機器は随時更新しています。 ※ Apple、Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 ※ Google Play、Google PlayロゴはGoogle LLCの商標です。

※ Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、BluetoothSIG, Incが所有する登録商標であり、オムロンヘルスケア(株)は、これらのマークをライセンスに基づき使用しています。

警告 スマートフォンと通信をおこなう機器は電波を使用しています。
植込み型医療機器を装着されている方は、医師の指導のもとご使用ください。

2.4 X X 1



◀フクダコーリンホームページ(<https://colin.fukuda.co.jp/>)

安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず「医療機器添付文書」「取扱説明書」をお読みの上、正しく安全にお使いください。

価格・納期・注文に関するお問い合わせは「フクダコーリン」の最寄りの営業所までお問い合わせください

販売業者



フクダコーリン株式会社

本社 〒113-8420 東京都文京区本郷2-35-27

営業拠点

札幌 (011) 751-6061	盛岡 (019) 652-4795	仙台 (022) 371-8414	北陸 (076) 238-7702	長野 (0263) 50-7290
新潟 (025) 240-1110	東京 (03) 3815-6851	東関東 (043) 234-1031	埼玉 (048) 826-6236	横浜 (045) 710-0860
静岡 (054) 208-0272	名古屋 (0568) 35-5311	京都 (075) 366-9141	大阪 (06) 6271-4617	神戸 (078) 261-2345
岡山 (086) 244-0165	四国 (089) 905-7035	広島 (082) 278-8833	福岡 (092) 710-6500	熊本 (096) 387-1133
鹿児島 (099) 254-8622		(出張所) 茨城 (029) 826-2820	沖縄 (098) 887-3750	

※改良のため、商品ラインナップや仕様および外観を予告なく変更することがあります。

※商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。

※注文の合計(仕切価格の合計)金額が1万円以下の場合は、1,000円(税別)の小口手数料が別途かかります。予めご了承ください。

※弊社で指定した送付先以外に発送する場合は、1,000円(税別)の直送手数料が別途かかります。

お問い合わせ、ご用命は…