


# クイックガイド 【医療機関向け】

3146453-0 B

●各部の名前

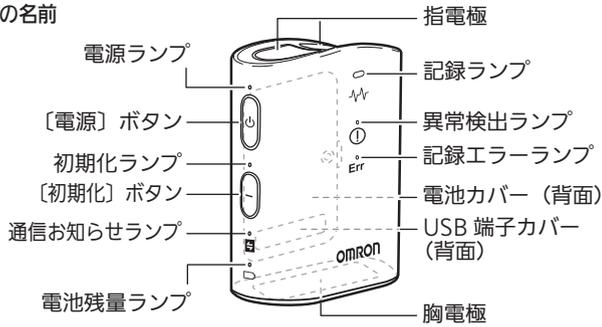

## オムロン 判読支援ソフトの取扱説明書について

「オムロン 判読支援ソフト」の取扱説明書は印刷物として用意しておりません。


「オムロン 判読支援ソフト」を起動させたあと、以下の方法で取扱説明書を閲覧することができます。

- 「ヘルプ」メニューから「取扱説明書」を選択する


## 1 電池を入れる

### ① 電池カバーを取りはずす

- ・ドライバー（付属品）を使ってねじを緩め、電池カバーを取りはずします。

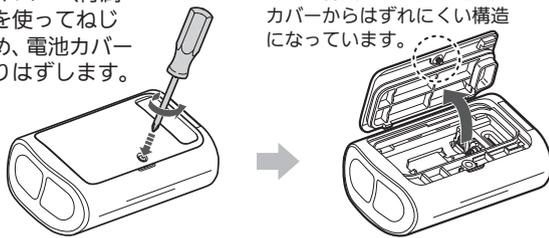

### ② 電池の向きに注意して入れる

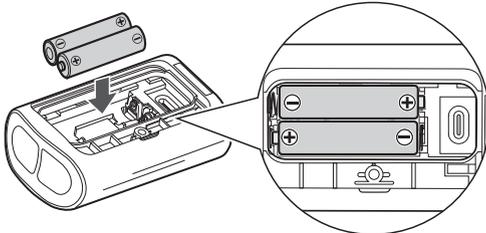

### ③ 電池カバーを取り付ける

- ・電池カバーがしっかりと固定されていることを確認してください。

## 2 ソフトウェアをインストールする


「オムロン 判読支援ソフト」\*をパソコンにインストールする

- ・パッケージに同梱のインストールマニュアルに従ってプログラムをインストールしてください。

\* 心電計に記録した心電図データをパソコンに取り込み、心電図や解析結果をパソコンのディスプレイに表示したり、プリンターに印刷したりするソフトウェアです。（別売品）


## 3 心電計とパソコンをつなぐ

USB ケーブル（付属品）で心電計とパソコンをつなぐ

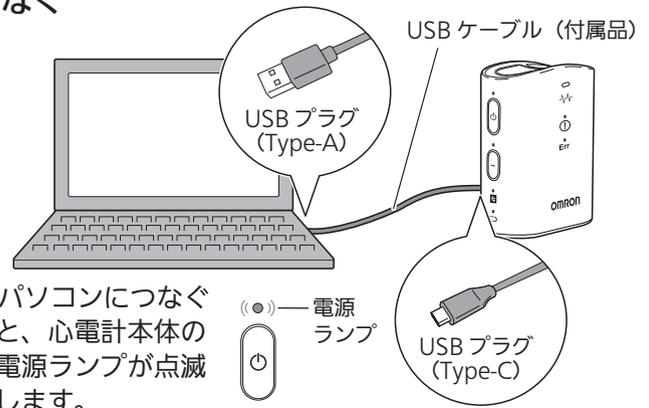

- ・パソコンにつながると、心電計本体の電源ランプが点滅します。

### USB ケーブル（付属品）の接続

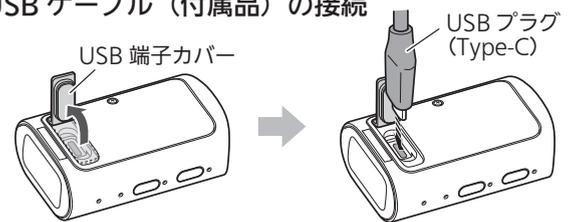

## 4 心電計の日時を設定する（初期設定）

- ① パソコンの「オムロン 判読支援ソフト」を起動する
- ② 「時刻を同期しますか？」ダイアログで「時刻同期する」ボタンをクリックする
  - ・日時を設定すると、次回からこのダイアログは表示されません。

## 5 ID 情報をソフトウェアに登録する

ID を設定すると、パソコンに心電図データを取り込む際、自動的に ID ごとのフォルダーへ振り分けられるので、心電図の管理がしやすくなります。

本書では ID 情報を 1 件ずつ登録する方法で説明していますが、詳しくは、「オムロン 判読支援ソフト HCG-SOFT-CL2 取扱説明書」の「ID 情報を登録・設定する」を参照してください。

- ① ツールバーの「設定」アイコン（ 設定）をクリックする
- ② 「設定」ダイアログで「追加」ボタンをクリックして ID 情報を登録する
  - ① 各セルをクリックして「ID」「患者氏名」「備考」を入力する
  - ② ID 情報の入力完了したら「OK」ボタンをクリックする

