

解析結果比較表

HCG-9010U

判読支援ソフト HCG-SOFT-CL2
バージョン 2.0.0
の取説p.27より抽出

文字アイコン (メイン画面)	イベント	詳細画面	イベント
HR	120 bpm 以上	心拍数	120 bpm 以上
	50 bpm 以下		50 bpm 以下
R	R 波未検出 (2s 以上)	R 波	2 秒以上未検出
RR	変動率 10 % 以上	RR 間隔	変動率 10 % 以上
	正常間隔 80 % (3 連)		正常間隔 80 % 以下、3 連発
	正常間隔 80 % (単)		正常間隔 80 % 以下、単発
QRS+RR	正常間隔 80 % (3 連)	QRS 形状異常 +RR 間隔	正常間隔 80 % 以下、3 連発
	正常間隔 80 % (2 連)		正常間隔 80 % 以下、2 連発
	正常間隔 80 % (単)		正常間隔 80 % 以下、単発
ST/-T	ST 変位または陰性 T 波	ST/-T	ST 変位 (± 0.4 mV 以上) または陰性 T 波
—	解析できません	—	解析できません

HCG-901

判読支援ソフト HCG-SOFT-CL1
バージョン 1.2
の取説p.27より抽出

イベント	イベントの日本語名
Tachycardia	頻脈
Bradycardia	徐脈
Pause	心休止
Irregular RR	RR 不整
S-Run	3 連発以上の SVPC
SVPC	上室性期外収縮
V-Run	3 連発以上の VPC
Couplet	2 連発以上の VPC
VPC	心室性期外収縮
Abnormal ST	ST 異常
No Analysis	解析不能